

5 dicas

Sistema MiniMed™ 780G
com sensor Guardian™ 4



Aprovado para a parte superior de trás do
braço para idades igual ou maior que 7 anos.

1 O local é importante

O lugar onde você insere o sensor pode fazer uma grande diferença. A melhor escolha é aplicar em uma área plana com tecido subcutâneo adequado e livre de cicatrizes.

2 Se considerar necessário, peça ajuda

Você pode precisar de ajuda para aplicar o sensor em alguns locais:

- Peça ajuda à alguém;
- Fique em frente a um espelho e/ou
- Consulte os guias de suporte da Medtronic para dicas

3 Garanta uma boa fixação

Garanta que a base do sensor e o transmissor estejam bem fixados à pele com os dois adesivos ovais. Se ainda assim for necessário mais algum adesivo para fixação, você pode colocá-lo por cima. Caso utilize alguma proteção cutânea, aplique-a após inserir o sensor e antes de fixar os adesivos.

4 "Atualização do Sensor"

Esta é uma função de segurança que é mais provável que aconteça no primeiro dia. Não é necessário agir, a menos que sua bomba solicite. Na maioria das vezes, esta situação será resolvida automaticamente em uma hora. Mas se durar mais de 3 horas, substitua o sensor e entre em contato com a Medtronic para obter ajuda.

5 Lembre-se de que o algoritmo está do seu lado

Por segurança, todos os bolus (alimentação e correção) são analisados pelo algoritmo antes de serem administrados para evitar hipoglicemias. Se você tem hiperglicemia após as refeições converse com sua equipe de saúde sobre o momento de informar os carboidratos na bomba e/ou configurações da terapia.



Tem mais perguntas?

Entre em contato com nosso suporte técnico **0800 773 9200**
24 horas por dia, 7 dias por semana.

Ou **contate seu Especialista Clínico** para suporte educacional em horário comercial.



Estamos com você nesta jornada!

Consulte um profissional de saúde sobre as decisões de tratamento.

Informações de segurança importantes: sistema MiniMed™ 780G com tecnologia SmartGuard™ com sensor Guardian™ 4

O Sistema MiniMed™ 780G com sensor Guardian™ 4 foi projetado para administração contínua de insulina basal com alvos selecionáveis e administração de insulina em bolus em quantidades selecionáveis para gerenciar o diabetes mellitus tipo 1. Além disso, é indicado para pacientes de 7 a 80 anos de idade, cuja dose diária total de insulina é de 8 unidades por dia ou mais.

O sistema também é indicado para monitorização contínua dos valores de glicose encontrados no líquido intersticial. O sistema MiniMed™ 780G inclui a tecnologia SmartGuard™, que pode ser programada para ajustar automaticamente a administração de insulina com base na monitorização contínua de glicose (CGM) e pode suspender a entrega de insulina quando o valor de glicose do sensor cai ou prevê que vai cair abaixo dos valores limite predefinidos. O sistema deve ser prescrito por um médico.

O sistema MiniMed™ 780G Medtronic é composto pelos seguintes dispositivos: a bomba de insulina MiniMed™ 780G, o transmissor Guardian™ 4, o sensor Guardian™ 4 e o dispositivo de inserção One-press Serter. O sensor Guardian™ 4 é indicado para uso com o sistema MiniMed™ 780G para ajustar as taxas basais de insulina e administrar bolus de correção automática quando a função SmartGuard™ é ativada.

O sistema MiniMed™ 780G com sensor Guardian™ 4 não requer punções capilares para realizar calibrações ou tomar decisões de tratamento do diabetes. As decisões de tratamento devem ser tomadas com base na combinação de leituras de VS e setas de tendência. Uma medição de glicemia por punção capilar é necessária para ativar o recurso SmartGuard™ pela primeira vez. Se os alertas de glicose e as leituras do sistema CGM não corresponderem aos sintomas ou expectativas, use um medidor de glicose no sangue para tomar decisões sobre o tratamento do diabetes.

A terapia com bomba não é recomendada para pessoas cuja visão ou audição não lhes permite reconhecer os sinais, alertas ou alarmes da bomba. A terapia com bomba não é recomendada para pessoas que não estão dispostas ou que não conseguem manter acompanhamento com seu profissional de saúde. A segurança do sistema MiniMed™ 780G em mulheres grávidas não foi estudada. Para obter informações completas sobre o sistema, incluindo informações sobre o produto e informações de segurança importantes, como indicações, contraindicações, advertências e precauções associadas ao sistema e seus componentes, consulte <http://www.medtronicdiabetes.com/important-safety-information#minimed-780g> e o guia do usuário relevante em <http://www.medtronicdiabetes.com/download-library>.

Alerta: Quando o sistema MiniMed™ 780G não está com a função SmartGuard™ ativada, a bomba de insulina funcionará no modo manual.

OBSERVAÇÃO AOS PACIENTES: Todos os dispositivos mostrados aqui são produtos de prescrição e devem ser obtidos de um profissional ou médico licenciado. Consulte as instruções de uso. Verifique se o produto está disponível em sua região e se está em conformidade com as normas/regulamentos.

REGISTRO ANVISA - 10349001315

©2025 Medtronic. Todos os direitos reservados. Medtronic, o logo da Medtronic e Outros, são em conjunto marcas registradas da Medtronic™. Marcas de terceiros são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Todas outras marcas são marcas registradas de uma empresa da Medtronic. 01/2025 -



Medtronic