

Medtronic

Uma vida
com menos
interrupções†

†Em comparação com o conjunto de infusão de 3 dias MiniMed™ Quick-set™

Conjunto de infusão Extended™ Medtronic

O primeiro e único conjunto
projetado para ter o dobro de
duração.¹




Mantém os locais que você prefere funcionando por mais tempo[†]

Tempo de uso prolongado,[†] sem
comprometer o conforto²
ou a administração de insulina.¹

Menos trocas de conjuntos significa mais
tempo para que os locais de infusão
descansem e curem.² Escolha o conjunto
de infusão Extended™ e reduza suas
trocas de conjunto pela metade.

†vs o conjunto de infusão de 3 dias MiniMed™ Quick-set™

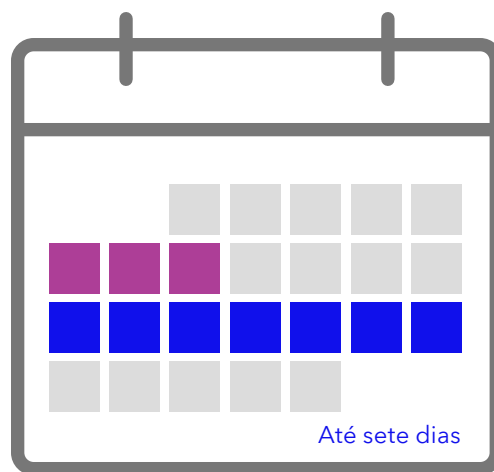

- Outros conjuntos de infusão
- Conjunto de infusão
Extended™ Medtronic

Fácil de usar e
praticamente
indolor³

Interpretação de ator.




O conjunto de infusão Extended™ Medtronic utiliza materiais avançados

- O novo cateter e conector melhoram a estabilidade da insulina.⁴
- O novo adesivo amigável à pele, prolonga o tempo de uso para proporcionar conforto e durabilidade por até 7 dias.⁴

Economia

Como a insulina do cateter é descartada a cada troca de conjunto, os pacientes podem usar de 5-10 frascos a menos de insulina por ano.⁵

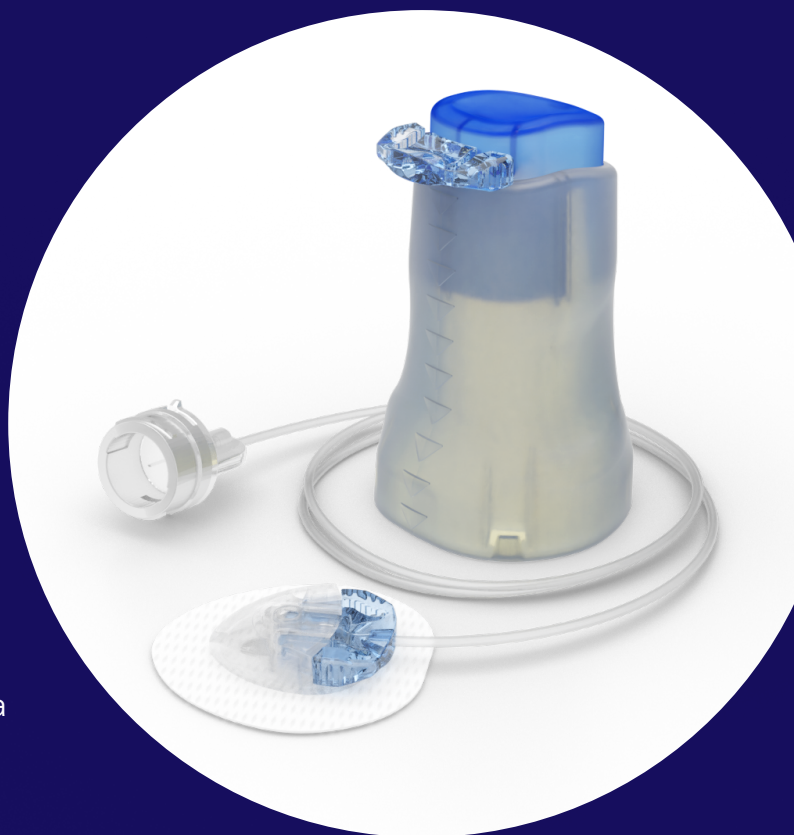

Conjunto de infusão Extended™ Medtronic

Somente disponível para utilização com bombas de insulina MiniMed™



REFERÊNCIAS:

1. Ilany J, et al. Abstract 416 - Clinical study of a new Extended™ wear infusion set design. 13th ATTD International Conference. February, 2020. | 2. Data on file. Clinical evaluation document: Clinical evaluation report for the Extended™ wear infusion set. 2019. 10937618DOC. | 3. Data on file. Clinical evaluation document: Clinical evaluation report for the Extended™ wear infusion set. 2019. 10937618DOC. | 4. Zhang G, et al. 986-P - Assessment of adhesive patches for an Extended™ wear infusion set. 80th ADA International Conference, June 2020. | 5. Medtronic Data on File. MiniMed™ Mio™ Advance US Pivotal Trials. 152 Patients interviewed. 2020 | 6. Fusselman, H. et al. Presentation- The Extended™ Wear Infusion Set - A design for plastic waste reduction. 10th Annual Diabetes Technology Meeting. Nov. 2020 | 7. Chattaraj S, et al. 1167-P - CSII and Insulin: Does extending the wear duration of infusion sets save expensive insulin? 80th ADA International Conference, June 2020.



O reservatório Extended™ Medtronic está disponível com o conjunto de infusão Extended™ Medtronic.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA: Sistema MiniMed™ 780G com tecnologia SmartGuard™

O sistema MiniMed™ 780G com sensor Guardian™ 4 foi projetado para administração contínua de insulina basal em frequências selecionáveis e administração de insulina em bolus em quantidades selecionáveis para controlar o diabetes mellitus tipo 1. Além disso, é indicado para pacientes de 7 a 80 anos de idade, cuja dose diária total de insulina é de 8 unidades por dia ou mais. O sistema também é indicado para monitorização contínua dos valores de glicose encontrados no líquido subcutâneo. O sistema MiniMed™ 780G inclui a tecnologia SmartGuard™, que pode ser programada para ajustar automaticamente a administração de insulina com base no monitoramento contínuo de glicose (CGM) e pode suspender a entrega de insulina quando o valor de glicose do sensor cai ou prevê que vai cair abaixo dos valores limite predefinidos. O sistema deve ser prescrito por um médico. O sistema MiniMed™ 780G Medtronic é composto pelos seguintes dispositivos: a bomba de insulina MiniMed™ 780G, o transmissor Guardian™ 4, o sensor Guardian™ 4 e o dispositivo™ de inserção One-press Serter. O sensor Guardian™ 4 é indicado para uso com o sistema MiniMed™ 780G para ajustar as taxas basais de insulina e administrar bolus de correção automática quando a função SmartGuard™ é ativada. O sistema MiniMed™ 780G com sensor Guardian™ 4 não requer punções capilares para realizar calibrações ou tomar decisões de tratamento do diabetes. As decisões de tratamento devem ser tomadas com base na combinação de leituras de GS e setas de tendência. Uma medição de glicemia por punção capilar é necessária para ativar o recurso SmartGuard™ pela primeira vez. Se os alertas de glicose e as leituras do sistema CGM não corresponderem aos sintomas ou expectativas, use um medidor de glicose no sangue para tomar decisões sobre o tratamento do diabetes. A terapia com bomba não é recomendada para pessoas cuja visão ou audição não lhes permite reconhecer os sinais, alertas ou alarmes da bomba. A terapia com bomba não é recomendada para pessoas que não estão dispostas ou que não conseguem manter acompanhamento com seu profissional de saúde. A segurança do sistema MiniMed™ 780G em mulheres grávidas não foi estudada. Para obter informações completas sobre o sistema, incluindo informações sobre o produto e informações de segurança importantes, como indicações, contraindicações, advertências e precauções associadas ao sistema e seus componentes, consulte <http://www.medtronicdiabetes.com/important-safety-information#minimed-780g> e o guia do usuário relevante em <http://www.medtronicdiabetes.com/download-library>.

ALERTA: Quando o sistema MiniMed™ 780G não está com a função SmartGuard™ ativada, a bomba de insulina funcionará no modo manual.

Isenções: * Administrar um bolus 15 a 20 minutos antes de uma refeição melhora significativamente o controle pós-refeição. Recomendamos a administração de um bolus de alimentos.

O conjunto de infusão Extended™ é indicado para até 7 dias de uso para a infusão subcutânea de insulina a partir de uma bomba de infusão. NÃO é indicado para administração intravenosa (IV) infusão ou infusão de sangue ou hemoderivados. A administração imprecisa de medicamentos, a infecção e/ou a irritação do local podem resultar da inserção e manutenção inadequadas do local da infusão. Antes da inserção, limpe o local de inserção com álcool isopropílico. Remova a proteção da agulha antes de inserir o conjunto de infusão. Se utilizar este conjunto de infusão pela primeira vez, faça a primeira preparação na presença do seu profissional de saúde. Não deixe ar no conjunto de infusão. Prime completamente. Verifique com frequência para se certificar de que a cânula macia permanece firmemente no lugar, pois você pode não sentir dor se ela se puxar para fora. A cânula flexível deve estar sempre completamente inserida para receber a quantidade total de medicação. Se o local da infusão ficar inflamado, substitua o conjunto e use um novo local até que o primeiro local tenha cicatrizado. Substitua o conjunto de infusão se a fita se soltar ou se a cânula flexível se desalojar total ou parcialmente da pele.

Substitua regularmente o conjunto de infusão conforme indicado nas instruções de utilização ou de acordo com a rotulagem da insulina, consoante a duração mais curta. Para obter mais detalhes, consulte <https://www.medtronicdiabetes.com/important-safety-information>.

O reservatório Extended™ requer receita médica e é indicado para a infusão subcutânea de insulina de bombas de insulina e conjuntos de infusão Medtronic compatíveis. Consulte o guia do utilizador da bomba de insulina Medtronic para obter uma lista de insulinas e conjuntos de infusão compatíveis. O reservatório é contraindicado para a infusão de sangue ou hemoderivados. Use por um máximo de 7 dias, ou de acordo com a rotulagem da insulina, o que for mais curto. Para obter mais detalhes, consulte <https://bit.ly/importantsafety.importantsafety>.

OBSERVAÇÃO AOS PACIENTES: Todos os dispositivos mostrados aqui são produtos de prescrição e devem ser obtidos de um profissional ou médico licenciado.

IMPORTANTE: Por favor, consulte o manual na embalagem para ver todas as instruções, contraindicações, avisos e precauções.

REGISTROS ANVISA: 10349009043, 10349001003, 10349001315

©2025 Medtronic. Todos os direitos reservados. Medtronic, o logo da Medtronic e Outros, são em conjunto marcas registradas da Medtronic. ™ Marcas de terceiros são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Todas outras marcas são marcas registradas de uma empresa da Medtronic. 06/2025 - BR-NA-2500012

Medtronic