

Sua nova experiência

com o sensor Guardian™ 4 no
sistema MiniMed™ 780G



Sistema MiniMed™ 780G
Sensor Guardian™ 4



Medtronic

Componentes do sistema

O que há de novo?



Transmissor Guardian™ 4



Sensor Guardian™ 4

- Transmissor **sem impressão**
- **Aquecimento** do sensor (2 horas)
- Faixa de operação **50 - 400 mg/dL**
- **Não requer calibração[†]** - mas, cada glicemia capilar (GS) introduzida e confirmada na bomba é usada para calibrar o sensor.

[†]A glicemia capilar (GS) é necessária para entrar no modo SmartGuard™. Se os alertas de glicose e leitura do sensor não são condizentes com seus sintomas, utilize um glicosímetro para avaliar sua GS e tomar decisões. Consulte o Guia de usuário - Recurso SmartGuard™. Algumas interações do usuário são necessárias.


O que mantém igual?



Bomba
MiniMed™ 780G



Aplicativo
MiniMed™ Mobile

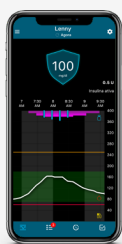

Aplicativo
CareLink™ Connect



Aplicador
MiniMed™
One-Press
serter



Adesivo
oval




Carregador




Adaptador
azul

Locais de aplicação do sensor

Idades entre 7-17 anos

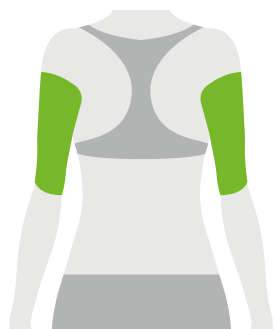


Parte de trás
superior do braço

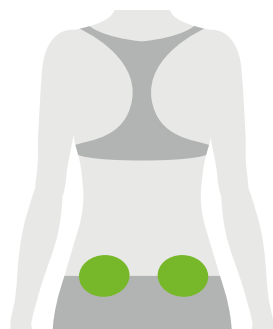

Parte superior
das nádegas

18 anos ou mais

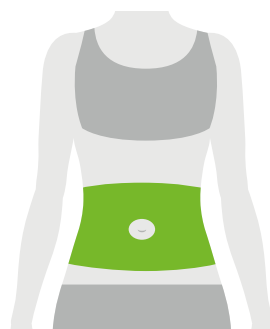

Abdômen



Parte de trás
superior do braço



A inserção no abdômen para idades entre 7 e 17 anos não foi avaliada em termos de acurácia.



A inserção na parte superior das nádegas nas idades iguais ou superiores a 18 anos não foi avaliada em termos de acurácia.

Nota: Ajuda pode ser necessária para aplicação do sensor na parte de trás do braço. Alguns usuários acham difícil realizar a aplicação sozinhos no braço.

Ícone do estado do sensor.



Ícones



Quando o sensor está trabalhando e nenhuma ação é necessária com o sensor, um ícone com um círculo verde irá aparecer ao redor de uma gota. Só aparecerá este ícone se o recurso do sensor estiver ativado.



Se a informação do sensor não está disponível, o ícone de círculo azul com ponto de interrogação aparecerá.



Quando o ícone de gota ficar vermelho, uma leitura de glicemia capilar é necessária.



Ocorre quando a bomba está aguardando o status do sensor ser atualizado, incluindo o aquecimento.

Iniciando o uso do transmissor Guardian™ 4

Para garantir que você tenha uma experiência segura e positiva quando iniciar o sistema, você deverá seguir alguns passos:

Passo 1

Carregue o transmissor assim que recebê-lo.

- Para carregar seu transmissor, coloque-o no carregador (conforme imagem à direita). Ao conectar você verá uma **luz verde** piscando no carregador.
- Assim que a luz verde parar de piscar, remova o transmissor do carregador.[†]

Nota 1: A primeira carga do seu transmissor deverá ocorrer obrigatoriamente até a data de validade que consta na caixa e ser realizada por no mínimo 2 horas.

Nota 2: Caso seu transmissor não esteja em uso você deve carregar seu transmissor ao menos uma vez a cada 60 dias.



Não guarde o transmissor no carregador por mais de 60 dias. Desconecte e reconecte ao carregador para uma nova carga do transmissor, no máximo a cada 60 dias. **Se o transmissor permanecer no carregador por mais de 60 dias a bateria será permanentemente danificada.**[‡]

Passo 2

Ative sua garantia

- Através do link: www.medtronic.diabetes.com.br
- Ou pela nossa central de atendimento Diabetes: 0800 773 9200

[†]Armazene seu transmissor, carregador e plug teste em local limpo e seco.

[‡]Consulte as Instruções de uso do transmissor Guardian™ 4 para informações detalhadas de carregamento e armazenamento.

Passo 3

Nós sabemos que você pode estar utilizando atualmente o Guardian™ sensor 3 com o transmissor Guardian™ Link 3.




NÃO use o Guardian™ sensor 3 com o seu novo transmissor Guardian™ 4 ou o sensor Guardian™ 4 com seu antigo transmissor Guardian™ Link 3, isso altera sua performance e pode causar leituras inacuradas.

Passo 4


Uma vez que seu transmissor Guardian™ 4 esteja **completamente carregado**, tenha em mãos também seu sensor Guardian™ 4, você deverá **desemparelhar** de sua bomba **seu antigo transmissor**, Guardian™ 3, e **emparelhar seu novo transmissor** Guardian™ 4.

Para isso, siga os seguintes passos:

Desemparelhando o transmissor atual

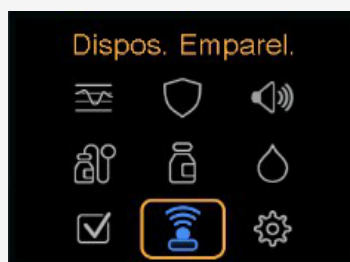


Selecione **Dispos. Emparel.**

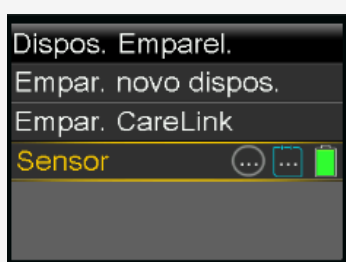

Selecione **Sensor**



Selecione **Desemparelhar**.

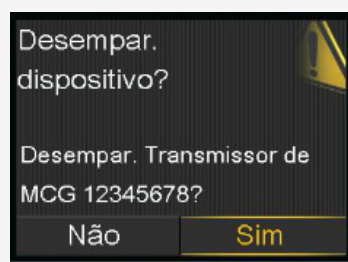

Selecione **Sim** para confirmar

Quando ocorrer o desemparelhamento do transmissor a bomba automaticamente sairá do modo SmartGuard™ e irá para o modo manual.


Pareando o transmissor Guardian™ 4



Selecione **Emparelhar novo dispositivo**.



Procurando. Neste momento retire o transmissor do carregador.

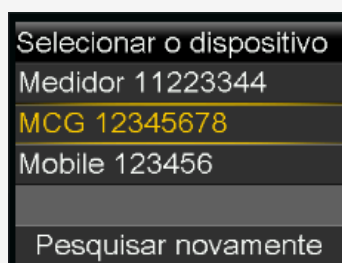

Selecione o dispositivo





Verificar na parte de trás do seu transmissor se o número de série é o mesmo da tela e confirmar.

Após 2 horas de aquecimento o VS aparecerá na bomba. Para entrar no modo SmartGuard™, o sistema irá solicitar uma glicemia capilar.

Início do sensor

O transmissor Guardian™ 4 não irá mostrar alerta de aquecimento do sensor quando for iniciado.

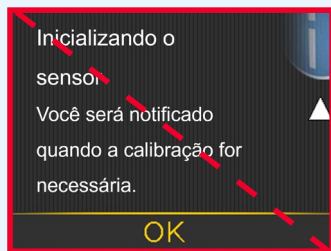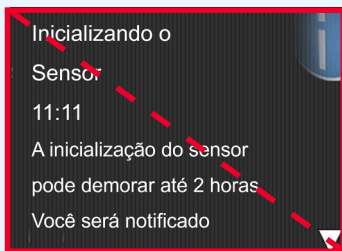

Quando as 2 horas de aquecimento acabar, a bomba iniciará o recebimento contínuo dos valores de glicose (VS). Não haverá alertas neste período.

Quando usar o valor de glicemia capilar

A glicemia capilar não é necessária[†] para calibração nem para realizar decisões no tratamento. Entretanto, os valores de GS, devem ser utilizados em alguns casos para decisões no tratamento ao invés do VS, são esses:

Caso 1: O escudo SmartGuard™ está visível mas o bolus na função SmartGuard™ recomenda usar a GS.

Caso 2: Para entrar no modo SmartGuard™ ou retomar após alguma saída.

Caso 3: Em uso de medicamentos que contenham acetaminofeno ou paracetamol.

Caso 4: Quando a leitura mais recente do sensor não está disponível.

Caso 5: Se a leitura do sensor está diferente dos sintomas que o usuário está sentindo.

Caso 6: Quando calcular a correção de bolus usando o Bolus Wizard™ no modo manual.

Caso 7: Se os alertas "insira a GS agora" ou "GS necessária" aparecerem.

Caso 8: Se o alerta de "Calibração não aceita, inserir GS" aparecer.

NOTA: Todas as leituras de GS inseridas na bomba são usadas para calibração. Se a calibração não for aceita o sistema irá solicitar uma glicemia adicional.

Atualizando o sensor



Esta mensagem pode ocorrer quando o algoritmo indica que **o sensor pode não estar funcionando adequadamente**. Na ocorrência desta atualização **por mais 3 horas é recomendado a troca do sensor** para maximizar o tempo em uso da função SmartGuard™.

[†] A glicemia capilar (GS) é necessária para entrar no modo SmartGuard™. Se os alertas de glicose e leitura do sensor não são condizentes com seus sintomas, utilize um glicômetro para avaliar sua GS e tomar decisões. Consulte o Guia de usuário - recurso SmartGuard™. Algumas interações do usuário são necessárias.



Dúvidas?

Entre em contato com
nosso suporte técnico
0800 773 9200 ou com
seu especialista clínico.



As informações contidas aqui não constituem aconselhamento médico e não devem ser usadas como alternativa a falar com seu médico. Discuta indicações, contraindicações, precauções, potenciais eventos adversos e qualquer informação adicional com o seu profissional médico.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

O sistema MiniMed™ 780G com sensor Guardian™ 4 foi projetado para administração contínua de insulina basal em frequências selecionáveis e administração de insulina em bolus em quantidades selecionáveis para controlar o diabetes mellitus tipo 1. Além disso, é indicado para pacientes de 7 a 80 anos de idade, cuja dose diária total de insulina é de 8 unidades por dia ou mais.

O sistema também é indicado para monitorização contínua dos valores de glicose encontrados no líquido subcutâneo. O sistema MiniMed™ 780G inclui a tecnologia SmartGuard™, que pode ser programada para ajustar automaticamente a administração de insulina com base no monitoramento contínuo de glicose (CGM) e pode suspender a entrega de insulina quando o valor de glicose do sensor cai ou prevê que vai cair abaixo dos valores limite predefinidos. O sistema deve ser prescrito por um médico.

O sistema MiniMed™ 780G Medtronic é composto pelos seguintes dispositivos: a bomba de insulina MiniMed™ 780G, o transmissor Guardian™ 4, o sensor Guardian™ 4 e o dispositivo™ de inserção One-press Serter. O sensor Guardian™ 4 é indicado para uso com o sistema MiniMed™ 780G para ajustar as taxas basais de insulina e administrar bolus de correção automática quando a função SmartGuard™ é ativada.

O sistema MiniMed™ 780G com sensor Guardian™ 4 não requer glicemias capilares para realizar calibrações ou tomar decisões de tratamento do diabetes. As decisões de tratamento devem ser tomadas com base na combinação de leituras de GS e setas de tendência. Uma medição de glicemia por punção capilar é necessária para ativar o recurso SmartGuard™ pela primeira vez. Se os alertas de glicose e as leituras do sistema CGM não corresponderem aos sintomas ou expectativas, use um medidor de glicose no sangue para tomar decisões sobre o tratamento do diabetes.

A terapia com bomba não é recomendada para pessoas cuja visão ou audição não lhes permite reconhecer os sinais, alertas ou alarmes da bomba. A terapia com bomba não é recomendada para pessoas que não estão dispostas ou que não conseguem manter acompanhamento com seu profissional de saúde. A segurança do sistema MiniMed™ 780G em mulheres grávidas não foi estudada. Para obter informações completas sobre o sistema, incluindo informações sobre o produto e informações de segurança importantes, como indicações, contraindicações, advertências e precauções associadas ao sistema e seus componentes, consulte <http://www.medtronicdiabetes.com/important-safety-information#minimed-780g> e o guia do usuário relevante em <http://www.medtronicdiabetes.com/download-library>.

Alerta: Quando o sistema MiniMed™ 780G não está com a função SmartGuard™ ativada, a bomba de insulina funcionará no modo manual.

Medtronic

OBSERVAÇÃO AOS PACIENTES: Todos os dispositivos mostrados aqui são produtos de prescrição e devem ser obtidos de um profissional ou médico licenciado. Consulte as instruções de uso. Verifique se o produto está disponível em sua região e se está em conformidade com as normas/regulamentos.

REGISTRO ANVISA - 10349001315

©2025 Medtronic. Todos os direitos reservados. Medtronic, o logo da Medtronic e Outros, são em conjunto marcas registradas da Medtronic™. Marcas de terceiros são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Todas outras marcas são marcas registradas de uma empresa da Medtronic. 01/2025 - LATAM-NA-2500028