



DÉMARRAGE – CRÉATION D'UN COMPTE CARELINK^{MC}

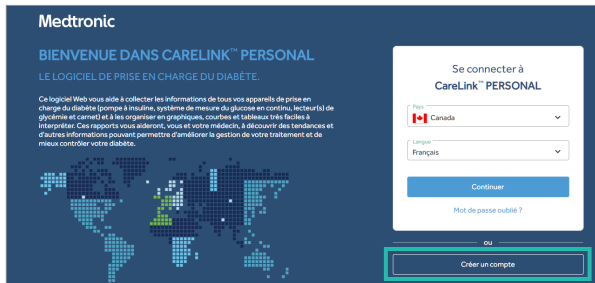

Pour utiliser le logiciel CareLink^{MC} Personal, vous devez avoir un compte. Suivez les étapes ci-dessous pour en créer un.


1 Accédez à <https://carelink.minimed.eu>*

2 Il s'agit de la **page d'accueil**. Pour créer un compte, cliquez sur **Créer un compte**.

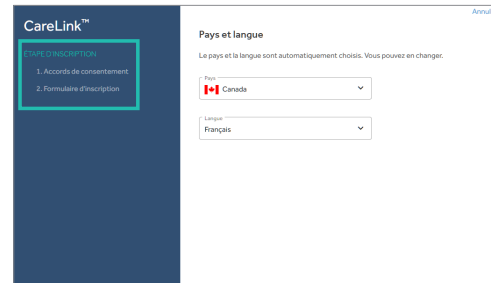

3 Le processus de création de compte comprend deux étapes principales : **Accords de consentement** et **Formulaire d'inscription**.

Le processus de création de compte vous aidera à franchir les étapes nécessaires. Le choix du pays et de la langue est la manière dont les écrans et les rapports seront remplis.

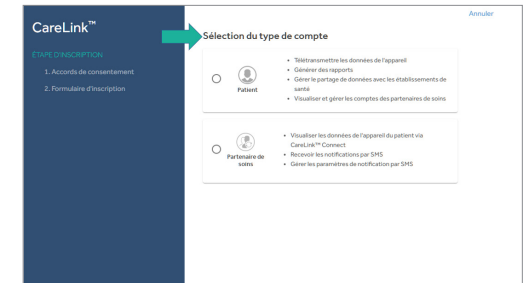


4 Créez ensuite votre compte **Patient**. Cette étape est nécessaire pour terminer la configuration du compte CareLink^{MC}. L'autorisation du **Partenaire de soins** est également incluse dans la collecte de consentement.

5 Ensuite, vous passerez aux **accords de consentement**.


Il s'agit d'une action ponctuelle. Il y a huit consentements différents que vous devrez lire et accepter, ou refuser.

L'acceptation ou le refus peut figurer au bas des pages de consentement. Après avoir fait votre choix, vous pourrez passer à la section suivante.

Vous avez le droit de révoquer n'importe lequel des consentements, à tout moment. Pour utiliser cette option, allez à la section **Accord de consentement** pour ouvrir et modifier votre décision.

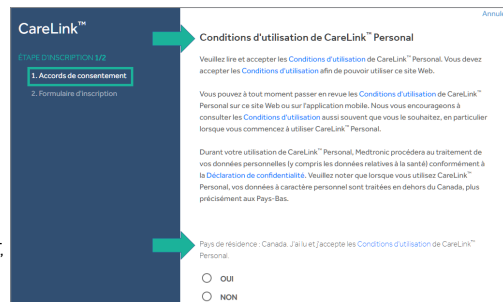


A

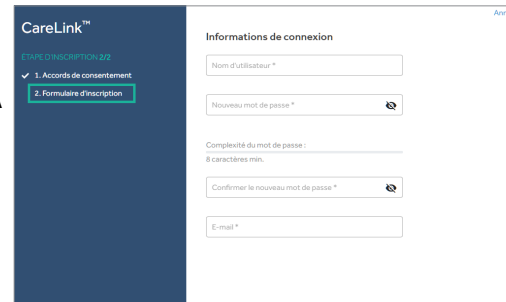

6 Vous avez presque terminé! **(A)** Vous êtes passé au **Formulaire d'inscription**. C'est ici que vous allez créer votre profil. Votre profil comprendra un nom d'utilisateur et un mot de passe de votre choix. Ne les oubliez pas parce que vous en aurez besoin pour utiliser le logiciel CareLink^{MC} Personal.

REMARQUE : Il ne sera pas nécessaire de remplir tous les champs. Seules les sections qui contiennent un (*) sont obligatoires pour pouvoir passer à l'écran suivant.

DÉMARRAGE – CRÉATION D'UN COMPTE CARELINK^{MC}

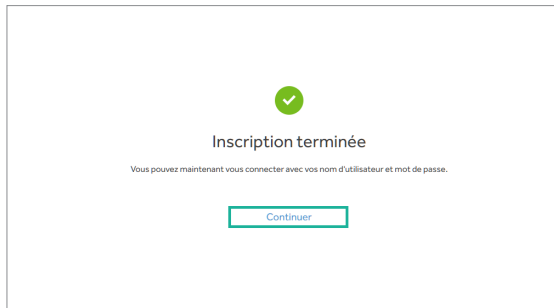


7 FÉLICITATIONS!

L'inscription est terminée. Sélectionnez le bouton **Continuer** pour revenir à la page d'accueil.




8 Cliquez sur **Continuer** et saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous venez de créer.

PROCHAINES ÉTAPES – UTILISATION DU LOGICIEL CARELINK^{MC}

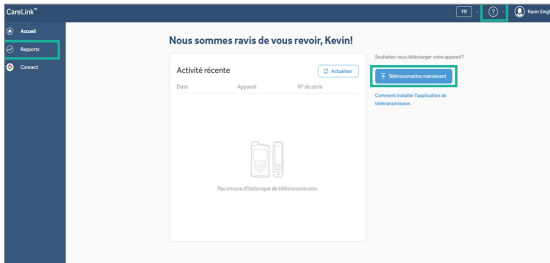

1 Vous êtes maintenant connecté et disposez de nombreuses options à partir de l'écran d'accueil. Vous pouvez :


- Télécharger vos appareils
 - Créer des rapports
 - Utiliser CareLink^{MC} Connect
 - Trouver des ressources dans le menu déroulant (?)
 - Accéder au menu déroulant Mon compte
- Nous allons passer en revue chaque option. Chacune des options comprend d'autres sélections.

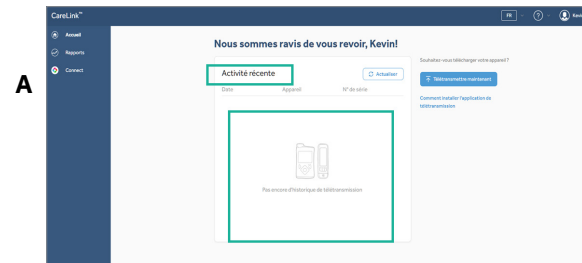


2 L'une des principales fonctions que vous effectuerez à partir de l'écran d'accueil est le téléchargement de votre appareil.

Si vous n'avez pas effectué de télétransmission, il n'y aura pas d'**Activité récente (A)**. À mesure que vous effectuez des télétransmissions, cette section recueillera l'**Activité récente (B)**. Les informations recueillies comprennent la date, l'heure, l'appareil et le numéro de série ou l'appareil téléchargé.

S'il s'agit d'une première télétransmission, reportez-vous à la section « Comment installer l'application de télétransmission CareLink^{MC} ».

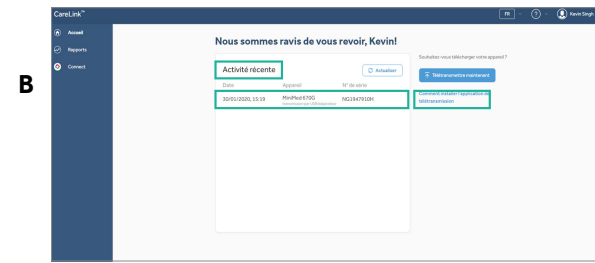


PROCHAINES ÉTAPES – UTILISATION DU LOGICIEL CARELINK^{MC}

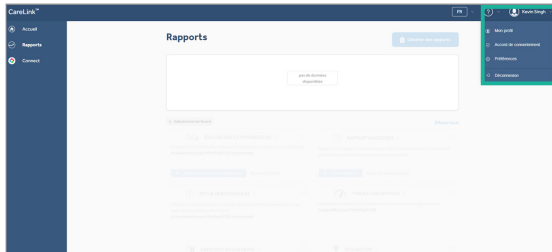

3 Écran d'accueil – Options personnelles

Examinez toutes les options.


- **Mon profil** – Contient toutes les informations personnelles que vous avez saisies lors de la création du compte
- **Accord de consentement** – Contient tous les consentements et vos choix
- **Préférences** – Permet d'individualiser le paramétrage des rapports
- **Déconnexion** – Permet de vous déconnecter du programme

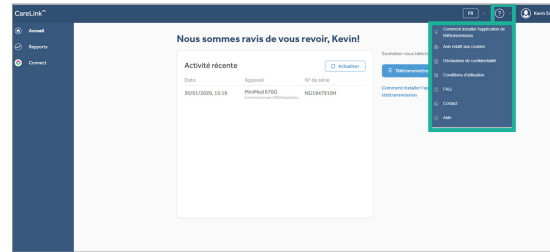

4 Écran d'accueil – Ressources

Dans cette section, vous trouverez des informations utiles sur ce qui suit :

- **Comment installer l'application de télétransmission**
- **FAQ**
- **Contact**
- **Aide**

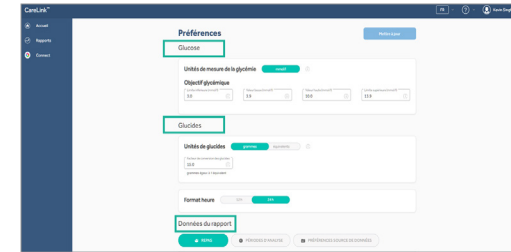


5 La page des **préférences** contient trois sections principales.

- **Glucose**
- **Glucides**
- **Données du rapport**

Dans chaque section, les paramètres par défaut seront déjà établis. Toutefois, vous pouvez personnaliser ces paramètres au besoin.

Jetez-y un coup d'œil et discutez-en avec votre fournisseur de soins de santé afin de déterminer quels paramètres vous conviennent le mieux.


A

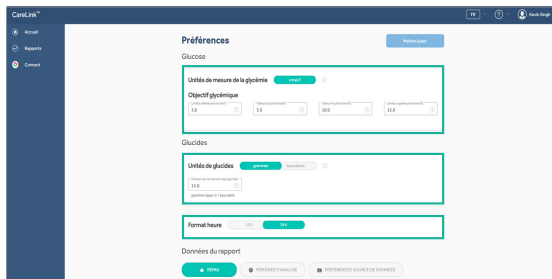

6A La section **Glucose (A)** est l'endroit où vous pouvez modifier l'un des paramètres suivants :

- **Unités de mesure de la glycémie** – Les valeurs peuvent être affichées en mmol/L
- **Objectif glycémique** – Comprend deux limites inférieures et deux limites supérieures
- **La section Glucides (A)** comprend Unités de glucides et Format heure.


B

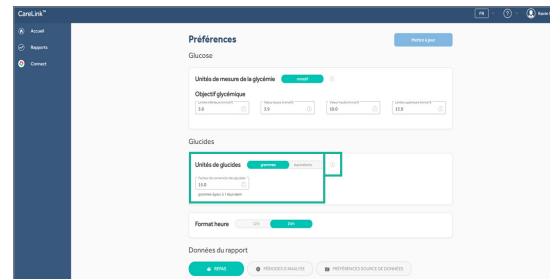

6B Nous passons maintenant à la section des **Glucides**. Ici, vous pouvez revoir ou modifier les paramètres suivants :

- **Unités de glucides**
- **Format heure**

(i) **Symbol (B)** – En cliquant sur ce symbole, vous obtiendrez plus d'informations sur la section et son utilisation.


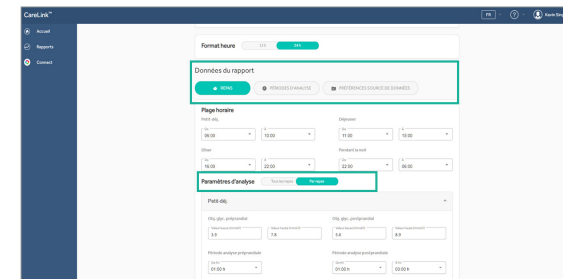


7 La section **Données du rapport** contient trois options permettant de revoir ou de modifier les paramètres. Le choix de l'une de ces options ouvre des paramètres supplémentaires.


- **Repas**
- **Périodes d'analyse**
- **Préférences source de données**

REMARQUE : Lorsque vous quitterez cette section, on vous demandera si vous souhaitez enregistrer les modifications apportées aux paramètres. C'est ainsi que vous enregistrez les éventuelles mises à jour.

PROCHAINES ÉTAPES – UTILISATION DU LOGICIEL CARELINK^{MC}

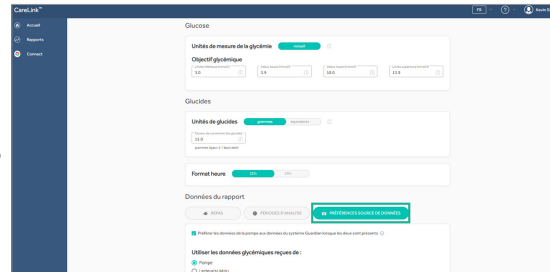
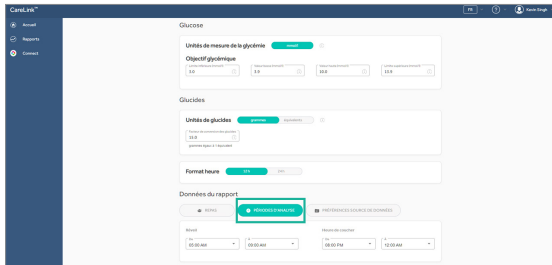


8 La section **Données du rapport** contient les options **Périodes d'analyse (A)** et **Préférences source de données (B)**. Comme toutes les autres sections, vous pouvez également revoir ou modifier les paramètres de cette section.

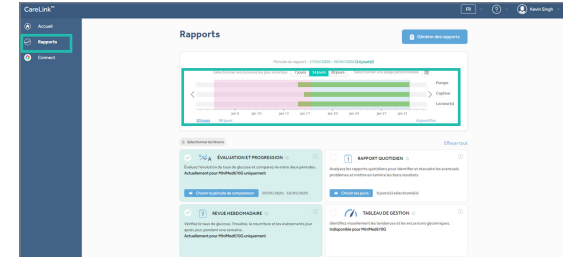

9 L'option **Rapports** à l'écran d'accueil vous permet de générer des rapports après la télétransmission de dispositifs. Pour ce faire, sélectionnez les rapports et ensuite la période de données visée. Vous disposez de quatre options :

- **7 jours – Automatique**
- **14 jours – Automatique**
- **30 jours – Automatique**
- **Plage personnalisée** – Entrez le début et la fin de la plage dans laquelle vous souhaitez consulter les rapports.

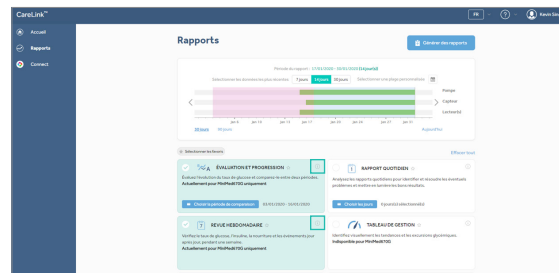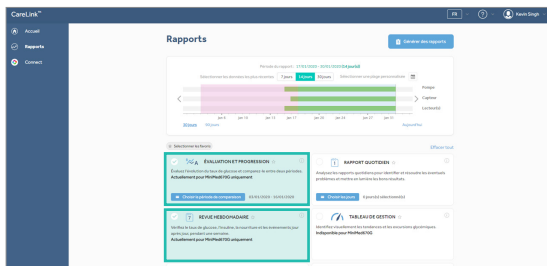

10 (A) Sélectionnez le(s) rapport(s) que vous souhaitez générer. **(B)** Vous pouvez trouver de l'aide en sélectionnant le symbole **(i)** pour obtenir une description plus détaillée de chaque rapport.