

# Medtronic

## Guia rápido Software CareLink™

### Bombas MiniMed™ série 700G

#### Instalar CareLink™ Uploader

**Se você é um usuário:** Vá para <http://Carelink.Minimed.eu>

**Se for um profissional de saúde:** <http://Carelink.Medtronic.eu>

Existem 2 formas de baixar os dados: A forma preferencial é através do aplicativo MiniMed™ Mobile. Consulte o Guia de referência rápida para o aplicativo MiniMed™ Mobile.

A outra forma é baixar os dados no software Carelink™ Personal, em um computador, com bombas MiniMed™ série 700 e o adaptador azul.

Se esta é a primeira vez que você usa o sistema CareLink™ Personal e não possui o software de upload em seu computador, siga estas etapas. Você só precisa fazer essas etapas uma vez.

- 1 Selecione o link “Como instalar a ferramenta de envio do CareLink” antes de baixar seu dispositivo. É necessária a autorização do administrador do computador.
- 2 Selecione “Transferir o instalador da ferramenta de envio do CareLink™” e siga as etapas de instalação para concluir o processo

↓ Transferir o instalador da ferramenta de envio do CareLink™

#### Baixa de dados com bombas MiniMed™ série 700 com o adaptador azul

Não insira o adaptador azul em seu computador até que o software de upload o instrua.

- 1 Selecione um:


Enviar agora

**Usuário:** Na tela inicial, selecione o botão azul para enviar os dados do seu dispositivo

Carregar dispositivo

**Prof. da Saúde:** Clique no nome do paciente e selecione o botão azul.

- 2 Se esta é a primeira vez que você está usando o software CareLink™, **você precisará adicionar dispositivos.**

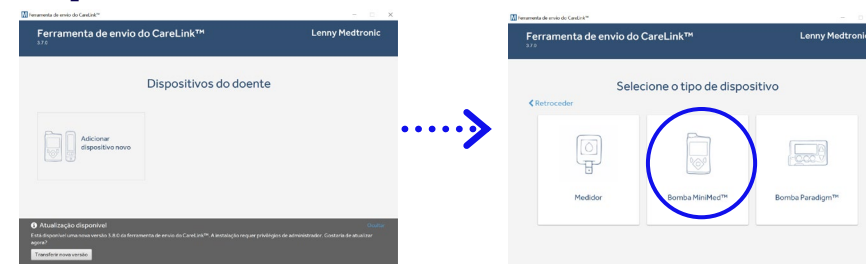

# Baixa de dados com bombas MiniMed™ série 700 com o adaptador azul



- 3 Selecione o modelo da sua bomba de insulina para baixar os dados. Você pode reconhecer a bomba MiniMed™ série 700 observando o símbolo do botão direito. O programa começará automaticamente a procurar o adaptador azul.

- 4 Insira o adaptador azul na porta USB do computador.



- 5 Uma vez encontrado, você receberá a mensagem do adaptador azul encontrado. Selecione Seguinte para continuar.



- 6 Se o adaptador azul não for inserido com antecedência, você poderá receber a mensagem **Adaptador azul não encontrado**.

Remova e reinsira o adaptador azul e selecione Tentar novamente.



- 7 Selecione o intervalo de tempo desejado para baixar os dados e, em seguida, **Selecione Seguinte**.

# Baixa de dados com bombas MiniMed™ série 700 com o adaptador azul



- 8 **Prepare o dispositivo para baixar os dados.** Elimine os alarmes ativos e substitua a bateria da bomba se estiver fraca. **Selecione Seguinte.**



- 9 **Emparelhar a bomba.** Na tela inicial da bomba, pressione e segure a tecla de seta para baixo até aparecer o menu CareLink™. Digite o código da bomba nos espaços que aparecem no CareLink™ Uploader. **Selecione Seguinte**



- 10 Na bomba, selecione **Enviar agora**. Esta etapa deve ser concluída para que os dados iniciem o processo de upload.

**Enviar agora** deve ser pressionado dentro de 2 minutos após acessar o menu.

- 11 Para confirmar que a baixa de dados foi iniciada:
1. Você verá a barra de progresso do upload do CareLink™ em seu computador.
  2. Em sua bomba, você verá um ícone de sincronização na parte superior da tela, semelhante a um **círculo giratório**.