

Guardian™ 4

Sensor User Guide

Guía del usuario del sensor

Guia do usuário do sensor



Introdução

O sensor Guardian™ 4 faz parte do sistema de monitoramento contínuo de glicose (MCG). O sensor converte pequenas quantidades de glicose do fluido intersticial existente sob a pele em um sinal eletrônico. O sistema então utiliza esses sinais para determinar os valores de glicose do sensor.



Conjunto do sensor

Indicações de utilização

O sensor Guardian 4 (MMT-7040Q) se destina a ser utilizado com o transmissor Guardian™ 4 (MMT-7841Q) para monitorar os níveis de glicose em pessoas com diabetes. O sensor foi concebido para substituir leituras de glicose no sangue através de punção digital para tomada de decisões terapêuticas para a diabetes.

O sensor se destina a ser inserido em pessoas com 7 anos de idade ou mais. O sensor se destina a ser inserido na parte de trás do antebraço ou na parte superior das nádegas em pessoas dos 7 aos 17 anos. O sensor se destina a ser inserido na parte de trás do antebraço ou no abdome em pessoas com 18 anos de idade ou mais.

Contraindicações

Não existem contraindicações associadas à utilização do sensor Guardian 4. Para contraindicações relacionadas com o MCG, consulte o guia do usuário do aplicativo Guardian™.

Benefícios clínicos

O sensor Guardian 4 é um componente do sistema de MCG que fornece valores de glicose do sensor. Consulte o Guia do usuário do aplicativo Guardian para obter informações sobre os benefícios clínicos de sistemas que utilizam o sensor Guardian 4.

Segurança do usuário

Avisos

Leia este guia do usuário na íntegra antes de tentar inserir o sensor Guardian 4. O aplicador One-press (MMT-7512) é o único aplicador aprovado para utilização com o sensor. Não seguir as indicações, ou a utilização de um aplicador diferente, pode resultar em uma inserção incorreta, dor ou lesão.

Não tente conectar um transmissor ou gravador que não seja compatível com o sensor. O sensor foi concebido para funcionar apenas com transmissores aprovados. Conectar o sensor a um transmissor ou gravador que não está aprovado para utilização com o sensor pode danificar os componentes. Consulte o guia do usuário do aplicativo Guardian para obter uma lista de produtos compatíveis.

Não use monitoramento contínuo da glicose se tomar hidroxiureia, também conhecida como hidroxycarbamida. A hidroxiureia é usada para tratar certas doenças, como o câncer e a anemia de células falciformes. O uso de hidroxiureia tem como resultado leituras mais elevadas da glicose no sensor, quando comparadas com as leituras da glicemia. Tomar hidroxiureia enquanto usa o monitoramento contínuo da glicose pode resultar em leituras substancialmente mais elevadas da glicose no sensor do que as verdadeiras leituras da glicemia.

Verifique sempre o rótulo de qualquer medicamento que tomar para confirmar se hidroxiureia ou hidroxycarbamida é um ingrediente ativo. Se tomar hidroxiureia, consulte um profissional de saúde. Utilize leituras adicionais do glicosímetro para verificar o nível da glicose.

Tomar medicamentos com acetaminofeno ou paracetamol, incluindo, entre outros, antipiréticos e medicamentos para resfriado, durante a utilização do sensor, pode provocar falsas leituras elevadas de glicose do sensor. O nível de inexactidão depende da quantidade de acetaminofeno ou de paracetamol ativo no organismo e pode variar de uma pessoa para outra. Verifique sempre o rótulo de todos os medicamentos para confirmar se o acetaminofeno ou o paracetamol é um ingrediente ativo.

Não exponha o sensor a equipamentos de ressonância magnética, aparelhos de diatermia ou a outros dispositivos geradores de campos magnéticos fortes. O desempenho do sensor não foi avaliado nessas condições e pode não ser seguro. Se o sensor for exposto a um campo magnético forte, interrompa a utilização e contate um representante local da assistência da Medtronic para assistência adicional.

Sempre inspecione a embalagem quanto a danos antes da utilização. Os sensores são estéreis e apirogênicos, a não ser que a embalagem tenha sido aberta ou danificada. Se a embalagem do sensor estiver aberta ou danificada, descarte o sensor diretamente em um recipiente para objetos cortantes. A utilização de um sensor não estéril pode resultar em infecção no local da inserção.

Não permita que crianças coloquem peças pequenas na boca. Este produto pode representar um risco de asfixia e resultar em ferimentos graves ou morte.

Profissionais de saúde ou cuidadores:

- Utilize sempre luvas para inserir o sensor. Uma agulha retrátil está presa ao sensor. Pode ocorrer um pequeno sangramento.
- Cubra o sensor com gaze estéril para remover a proteção da agulha do sensor.

Coloque a proteção da agulha diretamente em um recipiente para objetos cortantes após a inserção do sensor para evitar lesões acidentais provocadas por picadas de agulhas.

Verifique se ocorre sangramento no local de inserção (por baixo, ao redor ou por cima do sensor).


Caso ocorra sangramento, faça o seguinte:

1. Aplique uma pressão constante utilizando gaze estéril ou um pano limpo colocado por cima do sensor, durante um período máximo de três minutos. A utilização de uma gaze não estéril pode causar infecção no local.
2. Se o sangramento parar, conecte o transmissor (ou gravador) ao sensor.

Se o sangramento não parar, não conecte o transmissor ao sensor, pois sangue pode entrar no conector do transmissor e danificar o dispositivo.

Se sangramento continuar, causar dor ou desconforto excessivos, ou estiver significativamente visível na base de plástico do sensor, faça o seguinte:

1. Remova o sensor e continue aplicando pressão constante até o sangramento parar. Descarte o sensor em um recipiente para objetos cortantes.
2. Verifique se ocorre vermelhidão, sangramento, irritação, dor, sensibilidade ou inflamação no local. Trate com base nas instruções de um profissional de saúde.
3. Insira um novo sensor em um local diferente.

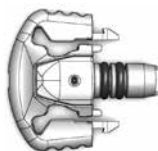

Base de plástico

Em caso de dúvidas ou preocupações relacionadas com a utilização do sensor, contate um representante da assistência local da Medtronic para obter ajuda.

No caso de dúvidas ou preocupações clínicas, contate um profissional de saúde.

Se ocorrer um incidente grave relacionado com o dispositivo, informe o incidente imediatamente a um profissional de saúde.

Profissionais de saúde: comunique quaisquer incidentes graves à Medtronic e às autoridades competentes.

Precauções

Lave as mãos com água e sabão antes de inserir o sensor Guardian 4, de forma a evitar infecções no local de inserção.

Não insira o sensor através do adesivo. A inserção do sensor através do adesivo pode causar a inserção incorreta e o mau funcionamento do sensor.

Utilize apenas álcool para preparar o local de inserção. Utilizar álcool para preparar o local de inserção garante que não permaneçam resíduos na pele.

Realize a rotação do local de inserção do sensor, de forma que os locais não sejam utilizados em excesso.

Não limpe, reesterilize ou tente extrair a agulha da proteção da agulha. Pode ocorrer uma picada ou punção acidental com a agulha.

Não reutilize os sensores. A reutilização de um sensor pode danificar a superfície do sensor, o que pode resultar em valores de glicose imprecisos, irritação no local de inserção ou infecção.

Riscos e efeitos colaterais

Mantenha o sensor Guardian 4 fora do alcance de crianças.

O sensor pode constituir perigo de asfixia suscetível de provocar ferimentos graves ou morte.

Outros riscos relacionados com a utilização do sensor incluem:

- Irritação da pele ou outras reações
- Equimoses
- Desconforto
- Vermelhidão
- Sangramento
- Dor
- Erupção cutânea
- Infecção
- Protuberâncias
- Aparecimento de um pequeno ponto semelhante a sardas no local onde foi inserida a agulha
- Reação alérgica
- Desmaio provocado por ansiedade ou medo de inserção de agulhas
- Dor ou sensibilidade
- Inchaço no local da inserção
- Fratura, quebra ou dano no sensor
- Respingo mínimo de sangue associado à remoção da agulha do sensor
- Rubor residual associado às fitas ou materiais adesivos ou ambos
- Cicatrizes

Substâncias perigosas

Nenhuma.

Alérgenos

Não são conhecidos.






Reagentes

O sensor Guardian 4 contém dois reagentes biológicos: glicose oxidase e albumina do soro humano (HSA). A glicose oxidase é derivada do *Aspergillus niger* e fabricada de modo a atender os requisitos da indústria para a extração e purificação de enzimas para utilização em aplicações de diagnóstico, imunodiagnóstico e biotécnicas. A HSA utilizada no sensor consiste em uma fração V de albumina purificada e seca derivada de soro humano pasteurizado, que é reticulada com glutaraldeído. Cerca de 3 µg de glicose oxidase e cerca de 10 µg de HSA são utilizados na fabricação de cada sensor. A HSA está aprovada para infusão IV em seres humanos em quantidades muito superiores às encontradas no sensor.

Remover o sensor

Para trocar o sensor Guardian 4, desconecte o transmissor do sensor como descrito no guia do usuário do transmissor Guardian. Cuidadosamente, afaste o sensor do corpo e remova-o. Descarte o sensor em um recipiente para objetos cortantes.


Componentes

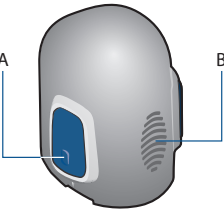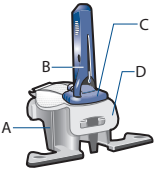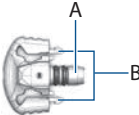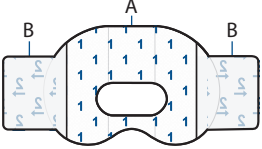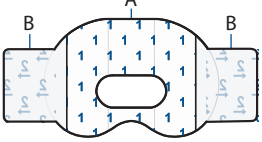	Aplicador One-press A. Saliência em ambos os botões B. Marca de impressão digital
	Conjunto do sensor de glicose A. Suporte B. Proteção da agulha C. Sensor D. Revestimento transparente
	Base do sensor A. Conector do sensor B. Encaixes do sensor
	Transmissor
	Primeira parte da fita adesiva oval A. Revestimento 1 B. Revestimento 2
	Segunda parte da fita adesiva oval A. Revestimento 1 B. Revestimento 2


Locais onde inserir o sensor

Escolha um local de inserção para o grupo etário aplicável. Utilize as áreas sombreadas e certifique-se de que o local de inserção tem uma quantidade suficiente de gordura.

Idades entre 7-17 anos

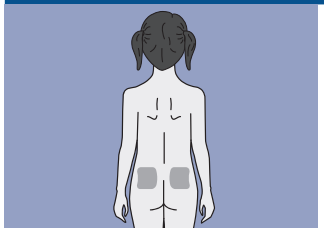

Parte superior das nádegas

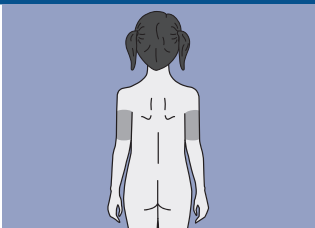


Parte de trás do antebraço




A exatidão da inserção no abdome para idades dos 7 aos 17 anos não foi avaliada.

Observação: a inserção na parte superior das nádegas deve atingir o terço superior da área da nádega. Poderá ser necessária ajuda de outra pessoa para a inserção do sensor na parte de trás do antebraço ou na parte superior da nádega. Se não for necessária ajuda, poderá ser útil usar um espelho para autoinserção.

Idades a partir de 18 anos

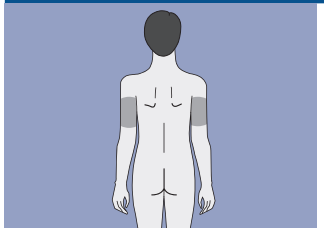

Parte de trás do antebraço

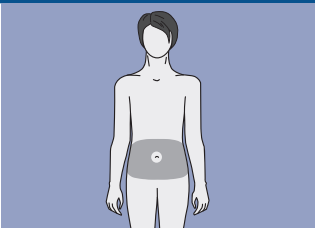

Abdome



A exatidão da inserção na parte superior das nádegas para idades a partir de 18 anos não foi avaliada.


ADVERTÊNCIA: evite a área de 5,0 cm (2 polegadas) em torno do umbigo para proporcionar um local de inserção confortável e para ajudar na aderência do sensor.

Para melhor desempenho do sensor de glicose e para evitar a remoção acidental do sensor:


- Não insira o sensor em músculo, pele dura ou tecido cicatricial.
- Evite áreas que estejam em contato com roupa ou acessórios.
- Evite áreas que estejam localizadas por baixo de um cinto ou cós.
- Evite áreas que estejam sujeitas a movimentos vigorosos durante a prática de exercício.

Inserir o sensor


AVISO: utilize sempre luvas ao inserir o sensor em outra pessoa para evitar contato com sangue do paciente. Pode ocorrer um pequeno sangramento. O contato com sangue do paciente pode causar infecção.

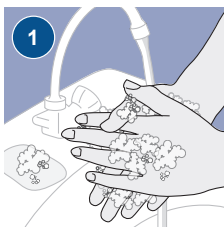

1. Lave bem as mãos com água e sabão.

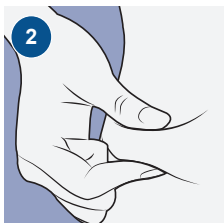


2. Escolha um local de inserção que tenha uma quantidade suficiente de gordura.

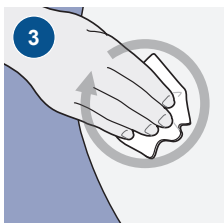

3. Limpe o local de inserção com álcool. Deixe a área secar ao ar.



4. Abra a embalagem do sensor.

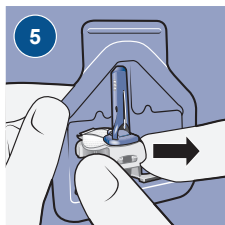

5. Segure o suporte e remova o conjunto do sensor de glicose da embalagem. Coloque o suporte sobre uma superfície limpa e plana, como uma mesa.

Lingueta dobrada




Correto



Incorreto

6. Confirme que a lingueta adesiva do sensor fica dobrada, presa por baixo do conector do sensor e dos encaixes do sensor.

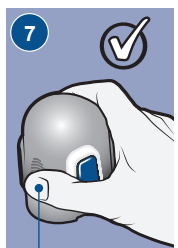



Correto




Incorreto

7. Usando qualquer uma das mãos, coloque um polegar na marca de impressão digital para segurar o aplicador. Não toque nos botões do aplicador com os dedos.

Polegar na marca de impressão digital

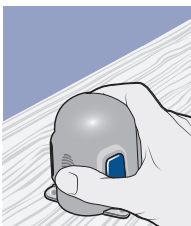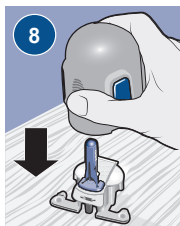

8. Encaixe o aplicador no suporte até a base do aplicador ficar bem plana na mesa e fazer um clique.

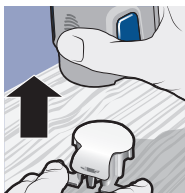


9. Com qualquer das mãos, coloque dois dedos na base do suporte. Com a outra mão, segure o aplicador e puxe-o para cima.



Observação: a seta no lado do aplicador se alinha com a agulha dentro do aplicador.

Seta


AVISO: nunca direcione um aplicador carregado para uma parte do corpo onde não pretende efetuar a inserção. Se o botão for pressionado acidentalmente, a agulha pode injetar o sensor em um local indesejado, causando lesões leves.

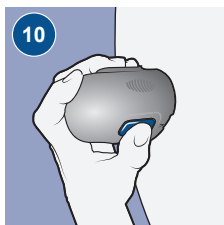


10. Coloque o aplicador sobre o local de inserção preparado.



11. Pressione e solte ambos os botões do aplicador simultaneamente. Continue segurando o aplicador sobre o local de inserção durante cinco segundos ou mais para permitir que o adesivo grude na pele.

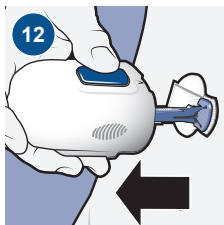

12. Retire o aplicador do local de inserção. Não pressione os botões com os dedos quando retirar o aplicador.

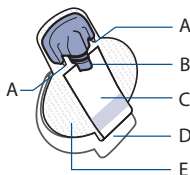

Base do sensor

A. Encaixes do sensor


B. Conector do sensor

C. Lingueta adesiva

D. Revestimento do adesivo

E. Almofada adesiva


Se o sensor tiver sido inserido sem ajuda, complete a etapa 13a.
Se o sensor tiver sido inserido com a ajuda de um profissional de saúde ou cuidador, complete a etapa 13b.

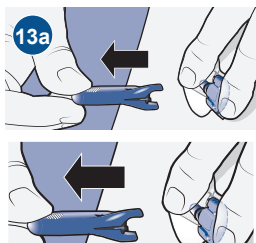

Paciente:

13. a. Segure a base do sensor contra a pele no conector do sensor e na extremidade oposta da base do sensor. Segure a extremidade superior da proteção da agulha e puxe para afastá-la do sensor.

OU

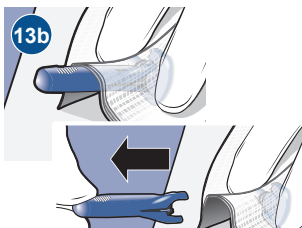

Profissional de saúde ou cuidador:

13. b. Envolve o sensor em uma gaze estéril. Segure a base do sensor contra a pele no conector do sensor e na extremidade oposta da base do sensor. Segure a extremidade superior da proteção da agulha e puxe para afastá-la do sensor.

AVISO: observe sempre se ocorre sangramento no local de inserção. Se ocorrer sangramento por baixo, ao redor ou por cima do sensor, aplique uma pressão constante utilizando uma gaze estéril ou um pano limpo por cima do sensor durante um período máximo de três minutos. A utilização de uma gaze não estéril pode causar uma infecção. Se o sangramento não parar, retire o sensor e aplique uma pressão constante até que o sangramento pare.



Observação: após a inserção, a utilização de produtos adesivos, como Skin Tac™, além da fita adesiva oval é opcional. Se forem utilizados produtos adesivos opcionais, aplique-os na pele por baixo da almofada adesiva antes de remover o revestimento. Os produtos adesivos também podem ser aplicados na almofada adesiva ou na pele em volta da base do sensor. Deixe o produto secar antes de continuar.



14. Remova o revestimento adesivo da parte inferior da almofada adesiva. Puxe o revestimento, afastando-o do sensor, mas mantendo-o próximo da pele. Não puxe o sensor ao retirar o revestimento.

Observação: não remova o revestimento adesivo da lingueta adesiva retangular. Essa lingueta será utilizada para prender o transmissor em uma etapa posterior.

Observação: se a base do sensor se mover, segure-a para baixo.



15. Pressione com firmeza a almofada adesiva contra o local de inserção para confirmar que a base do sensor se mantém na pele.



16. Desdobre a fita adesiva, retirando-a de debaixo do conector do sensor.



17. Estique a lingueta adesiva do sensor de modo que esta fique em uma posição plana contra a pele.


Aplicar a fita adesiva oval

1



1. Retire o revestimento assinalado com 1.


2

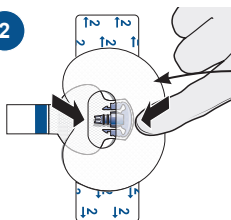

2. Aplique a fita adesiva conforme indicado e pressione com firmeza.


A parte larga da fita adesiva cobre metade da base do sensor

3

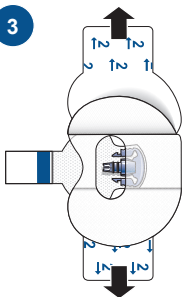


3. Retire os revestimentos assinalados com 2 de cada lado.

4

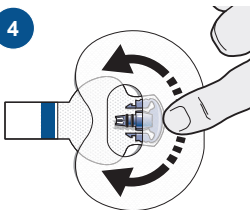

4. Alise a fita adesiva.


5

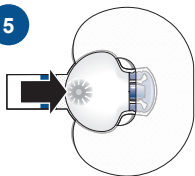

5. Conecte o transmissor ao sensor.

Observação: aguarde a luz verde do transmissor piscar. Se a luz verde não piscar, consulte a seção de Resolução de problemas de seu guia do usuário do transmissor Guardian 4.

6

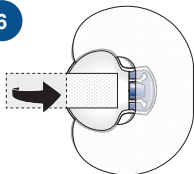

6. Cubra o transmissor com a lingueta adesiva.


Observação: não estique muito a lingueta.

7



7. Para aplicar uma segunda fita adesiva, retire o revestimento assinalado com 1.


8

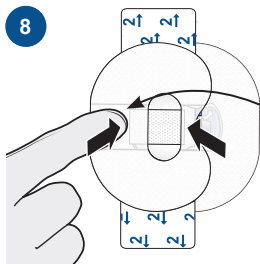

8. Aplique a segunda fita adesiva na direção oposta da primeira fita adesiva e coloque-a no transmissor. Pressione para baixo com firmeza.


A parte larga da fita adesiva cobre a extremidade do transmissor e a pele

9

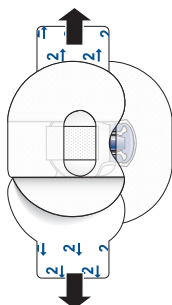

9. Retire os revestimentos assinalados com 2 de cada lado.

10

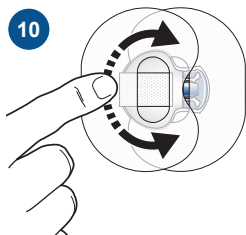

10. Alise a fita adesiva.

Observação: para obter detalhes sobre como inserir as configurações do sensor em um dispositivo de visualização compatível, consulte o guia do usuário do aplicativo Guardian.

Manutenção

Limpeza

O sensor Guardian 4 é um dispositivo descartável, de utilização única. Não é necessária limpeza ou manutenção.

Armazenamento

ADVERTÊNCIA: não congele o sensor nem o guarde exposto à luz solar direta, à temperaturas extremas ou à umidade. Estas condições podem danificar o sensor.

Guarde os sensores apenas à temperatura ambiente entre 2 °C e 27 °C (36 °F a 80 °F).

Descarte o sensor quando a data de validade indicada nas etiquetas tiver vencido, se a embalagem estiver danificada ou se o selo tiver sido violado.

Descarte

Descarte o sensor Guardian 4 em um recipiente para objetos cortantes.

Especificações técnicas

Dimensões aproximadas
3,8 x 6,7 x 5,2 centímetros (1,5 x 2,6 x 2,0 polegadas)
Peso aproximado
2,80 gramas (0,09 onças)

Vida útil do sensor

O sensor Guardian 4 pode ser utilizado uma vez e tem uma vida útil máxima de 170 horas (sete dias). O período de vida útil de 170 horas do sensor começa quando o sensor é conectado ao transmissor.

Tabela de símbolos	
	Data de validade
	Dispositivo médico
	Importador
	Não reutilizar
	Advertência: consulte as instruções de utilização para ver avisos ou precauções importantes que não estão incluídos na etiqueta.
(1x)	Um sensor por recipiente/embalagem
(5x)	Cinco sensores por recipiente/embalagem
(2x)	Duas fitas adesivas por embalagem
(10x)	Dez fitas adesivas por embalagem
	Consultar as instruções de utilização
	Número de catálogo
	Código do lote
	Esterilizado por irradiação
	Não utilizar se a embalagem estiver danificada
	Sistema de barreira estéril única
	Limite de temperatura de armazenamento
	Abrir aqui
	Fabricante
	Data de fabricação
	Não reesterilizar

	Frágil, manusear com cuidado
	Manter seco
	Reciclável, contém conteúdo reciclado
	Representante autorizado na Comunidade Europeia
	Conformité Européenne (Conformidade Europeia). Este símbolo significa que o dispositivo está em total conformidade com as Leis da União Europeia aplicáveis.
	Não seguro para exame de ressonância magnética (RM)
	Não pirogênico
	Requer prescrição médica nos EUA

©2021 Medtronic. Todos os direitos reservados. Medtronic, o logotipo da Medtronic e Further, Together são marcas comerciais da Medtronic. As marcas de terceiros são marcas comerciais dos respectivos proprietários. Todas as outras marcas são marcas comerciais de uma empresa da Medtronic. Skin Tac™

Africa:

Medtronic South Africa and
Southern Africa
Office Reception Tel:
+27(0) 11 260 9300
Diabetes: 24/7 Helpline:
0800 633 7867
Sub-Sahara 24/7 Helpline:
+27(0) 11 260 9490

Albania:

Net Electronics Albania
Tel: +355 697070121

Argentina:

Corpomedica S.A.
Tel: +(11) 4 814 1333
Medtronic Directo 24/7:
+0800 333 0752

Armenia:

Exiol LLC
Tel: +374 98 92 00 11
or +374 94 38 38 52

Australia:

Medtronic Australasia Pty. Ltd.
Tel: 1800 668 670

Bangladesh:

Sonargaon Healthcare Pvt Ltd.
Mobile: (+91)-9903995417
or (+880)-1714217131

Belarus:

Zarga Medica
Tel: +375 29 625 07 77
or: +375 44 733 30 99
Helpline: +74995830400

België/Belgique:

N.V. Medtronic Belgium S.A.
Tel: 0800-90805

Bosnia and Herzegovina:

Novopharm d.o.o. Sarajevo
Tel: +387 33 476 444
Helpline: 0800 222 33
Epsilon Research Intern. d.o.o.
Tel: +387 51 251 037
Helpline: 0800 222 33

Brasil:

Medtronic Comercial Ltda.
Tel: +(11) 2182-9200
Medtronic Directo 24/7:
+0800 773 9200

Bulgaria:

RSR EOOD
Tel: +359 888993083
Helpline: +359 884504344

Canada:

Medtronic of Canada Ltd.
Tel: 1-800-284-4416 (toll free/
sans frais)

Chile:

Medtronic Chile
Tel: +(9) 66 29 7126
Medtronic Directo 24/7:
+1 230 020 9750
Medtronic Directo 24/7 (From
Santiago): +(2) 595 2942

China:

Medtronic (Shanghai)
Management Co., Ltd.
Landline: +86 800-820-1981
Mobile Phone:
+86 400-820-1981
Calling from outside China: +86
400-820-1981

Colombia:

Medtronic Latin America Inc.
Sucursal Colombia
Tel: +(1) 742 7300
Medtronic Directo 24/7
(Landline): +01 800 710 2170
Medtronic Directo 24/7
(Cellular): +1 381 4902

Croatia:

Mediligo d.o.o.
Tel: +385 1 6454 295
Helpline: +385 1 4881144
Medtronic Adriatic d.o.o.
Helpline: +385 1 4881120

Česká republika:

Medtronic Czechia s.r.o.
Tel: +420 233 059 111
Non-Stop Helpline (24/7):
+420 233 059 059
Zákaznický servis (8:00 - 17:00):
+420 233 059 950

Danmark:

Medtronic Danmark A/S
Tel: +45 32 48 18 00

Deutschland:

Medtronic GmbH
Geschäftsbereich Diabetes
Telefon: +49 2159 8149-370
24-Std-Hotline: 0800 6464633

Eire:

Accu-Science Ltd.
Tel: +353 45 433000

España:

Medtronic Ibérica S.A.
Tel: +34 91 625 05 42
24 horas: +34 900 120 330

Estonia:

AB Medical Group Estonia Ltd
Tel: +372 6552310
Helpline: +372 5140694

Europe:

Medtronic Europe S.A. Europe,
Middle East and Africa HQ
Tel: +41 (0) 21-802-7000

France:

Medtronic France S.A.S.
Tel: +33 (0) 1 55 38 17 00

Hellas:

Medtronic Hellas S.A.
Tel: +30 210677-9099

Hong Kong:

Medtronic International Ltd.
Tel: +852 2919-1300
To order supplies:
+852 2919-1322
24-hour helpline:
+852 2919-6441

India:

India Medtronic Pvt. Ltd.
Tel: (+91)-80-22112245 /
32972359
Mobile: (+91)-9611633007
Patient Care Helpline:
1800 209 6777

Indonesia:

Medtronic International Ltd.
Tel: +65 6436 5090 or
+65 6436 5000

Israel:

Medtronic
Tel (orders): +9729972440,
option 3 + option 1
Tel (product support):
+9729972440, option 2
Helpline: (17:00 – 08:00 daily/
weekends – Israel time):
1-800-611-888

Italia:

Medtronic Italia S.p.A.
Tel: +39 02 24137 261
Servizio assistenza tecnica:
N° verde: 800 60 11 22

Japan:

Medtronic Japan Co. Ltd.
24 Hr. Support Line:
0120-56-32-56

Kazakhstan:

Medtronic BV in Kazakhstan
Tel: +7 727 311 05 80 (Almaty)
+7 717 224 48 11 (Astana)
Круглосуточная линия
поддержки:
8 800 080 5001

Kosovo:

Yess Pharma
Tel: +377 44 999 900
Helpline: +37745888388

Latin America:

Medtronic, Inc.
Tel: 1(305) 500-9328

Latvija:

RAL SIA
Tel: +371 67316372
Helpline (9am to 6pm):
+371 29611419

Lithuania:

Monameda UAB
Tel: +370 68405322
Helpline: +370 68494254

Macedonia:

Alkaloid Kons Dooel
Tel: +389 23204438

Magyarország:

Medtronic Hungária Kft.
Tel: +36 1 889 0688

Malaysia:

Medtronic International Ltd.
Tel: +603 7946 9000

México:

Medtronic Servicios S. de R. L.
de C.V.
Tel (México DF): +(11) 029 058
Tel (Interior): +01 800 000 7867
Medtronic Directo 24/7 (from
México DF): +(55) 36 869 787
Medtronic Directo 24/7:
+01 800 681 1845

Middle East and North Africa:

Regional Office
Tel: +961-1-370 670

Montenegro:

Glosarij d.o.o.
Tel: +382 20642495

Nederland, Luxembourg:

Medtronic B.V.

Tel: +31 (0) 45-566-8291

Gratis: 0800-3422338

New Zealand:

Medica Pacifica

Phone: 64 9 414 0318

Free Phone: 0800 106 100

Norge:

Medtronic Norge A/S

Tel: +47 67 10 32 00

Philippines:

Medtronic International Ltd.

Tel: +65 6436 5090 or

+65 6436 5000

Россия:

ООО «Медтроник»

Tel: +7 495 580 73 77

Круглосуточная линия

поддержки: 8 800 200 76 36

Polska:

Medtronic Poland Sp. z o.o.

Tel: +48 22 465 6934

Portugal:

Medtronic Portugal Lda

Tel: +351 21 7245100

Puerto Rico:

Medtronic Puerto Rico

Tel: 787-753-5270

Republic of Korea:

Medtronic Korea, Co., Ltd.

Tel: +82.2.3404.3600

Romania:

Medtronic Romania S.R.L

Tel: +40372188017

Helpline: +40 726677171

Schweiz:

Medtronic (Schweiz) AG

Tel: + 41 (0) 31 868 0160

24-Stunden-Hotline:

0800 633333

Serbia:

Epsilon Research International
d.o.o.

Tel: +381 113115554

Medtronic Serbia D.o.o.

Helpline: +381 112095900

Singapore:

Medtronic International Ltd.

Tel: +65 6436 5090 or

+65 6436 5000

Slovenija:

Zaloker & Zaloker d.o.o.

Tel.: +386 1 542 51 11

24-urna tehnična pomoč:

+386 51316560

Slovenská republika:

Medtronic Slovakia, s.r.o.

Tel: +421 26820 6942

HelpLine: +421 26820 6986

Sri Lanka:

Swiss Biogenics Ltd.

Mobile: (+91)-9003077499

or (+94)-777256760

Suomi:

Medtronic Finland Oy

Tel: +358 20 7281 200

Help line: +358 400 100 313

Sverige:

Medtronic AB

Tel: +46 8 568 585 20

Taiwan:

Medtronic (Taiwan) Ltd.

Tel: 02-21836000

Toll Free: +886-800-005285

Thailand:

Medtronic (Thailand) Ltd.

Tel: +662 232 7400

Türkiye:

Medtronic Medikal Teknoloji

Ticaret Ltd. Sirketi.

Tel: +90 216 4694330

Ukraine:

ТОВ Медтронік Україна

Лінія цілодобової підтримки:

0 800 508 300

USA:

Medtronic Diabetes Global

Headquarters

24 Hour HelpLine:

+1-800-646-4633

To order supplies:

+1-800-843-6687

United Kingdom:

Medtronic Ltd.

Tel: +44 1923-205167

Österreich:

Medtronic Österreich GmbH

Tel: +43 (0) 1 240 44-0

24 – Stunden – Hotline:

0820 820 190

Medtronic



Medtronic MiniMed

18000 Devonshire Street

Northridge, CA 91325

USA

1 800 646 4633

+1 818 576 5555

www.medtronicdiabetes.com



Medtronic B.V.

Earl Bakkenstraat 10

6422 PJ Heerlen

The Netherlands

C €0459

REF MMT-7040Q

2021/06/10

M811008A009_2

Lista de Partes/Acessórios:

Código	Descrição
MMT-7015	Fita adesiva oval
MMT-7512	Aplicador One-Press Serter (Possui registro próprio)
MMT-7841Q	Transmissor Guardian™ 4 BLE (Possuirá registro próprio)

PROIBIDO REPROCESSAR.

Registro ANVISA nº: 10349001282

Fabricante: Medtronic MiniMed 18000 Devonshire Street Northridge, CA 91325 Estados Unidos da América	Importado por: Auto Suture do Brasil Ltda. Av. Jornalista Roberto Marinho, 85 – 11º andar CEP: 04576-010 Cidade Monções São Paulo – SP, Brasil CNPJ: 01.645.409/0001-28 Tel.: (11) 2182-9200 (11) 2187-6200
	Responsável Técnico: Vide rótulo ou Consulte a Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) no Portal da Agência Nacional de Vigilância Sanitária