


Medtronic


Sistema MiniMed™ 780G

Guias de consulta rápida

- Como trocar o conjunto de infusão MiniMed™ Quick-set™
- Como aplicar o Guardian™ Sensor (3) com o aplicador One-press

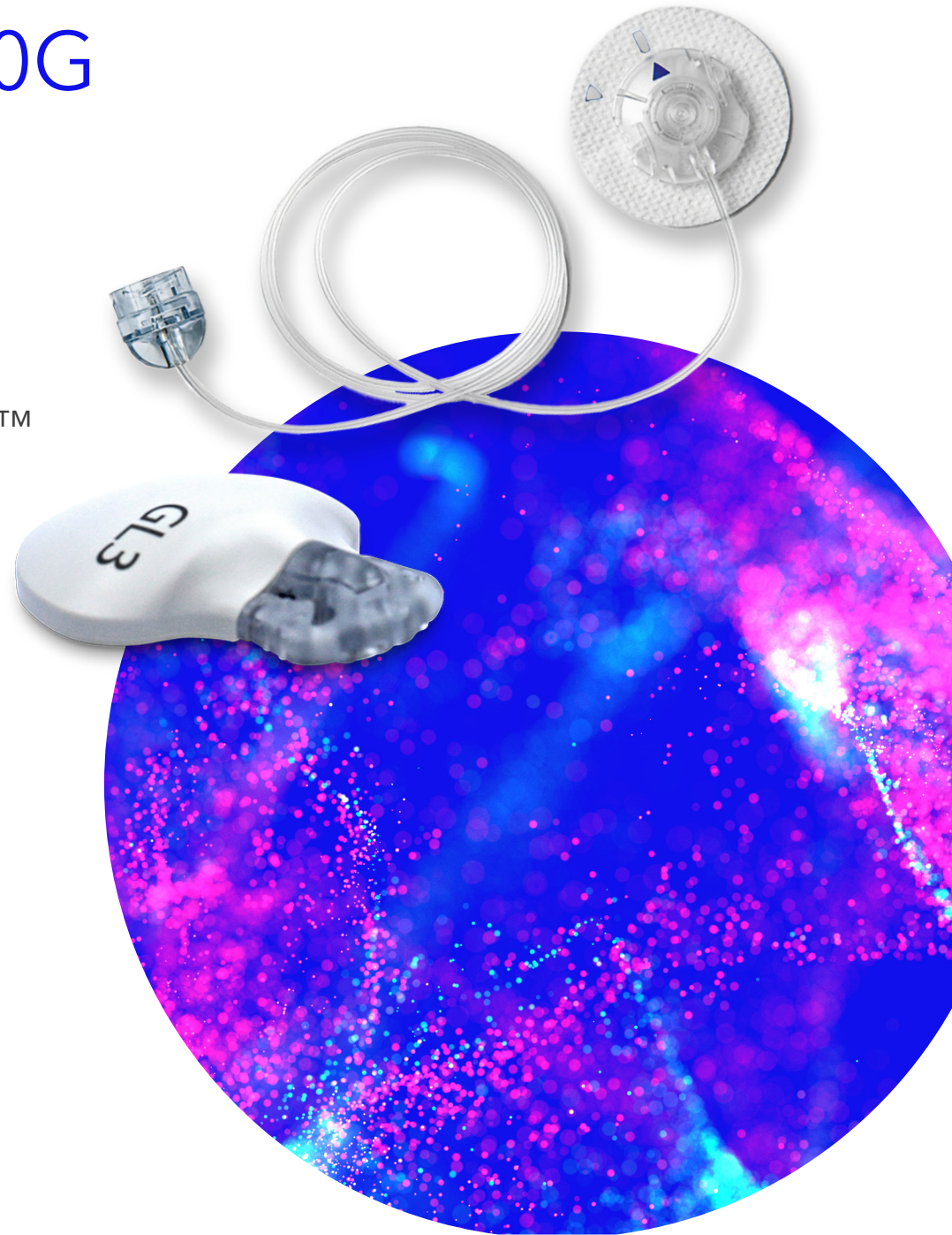

Trocar o conjunto de infusão MiniMed™ Quick-set™

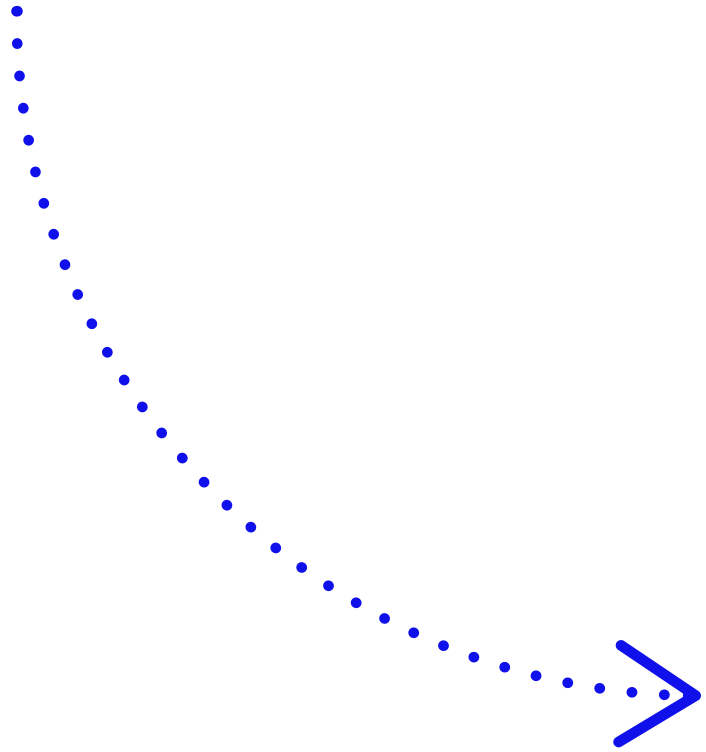


Trocar o conjunto de infusão MiniMed™ Quick-set™

Início:



Encher o reservatório e conectá-lo ao cateter do conjunto de infusão

Siga os próximos passos para encher o reservatório com insulina e conectá-lo ao cateter do conjunto de infusão.

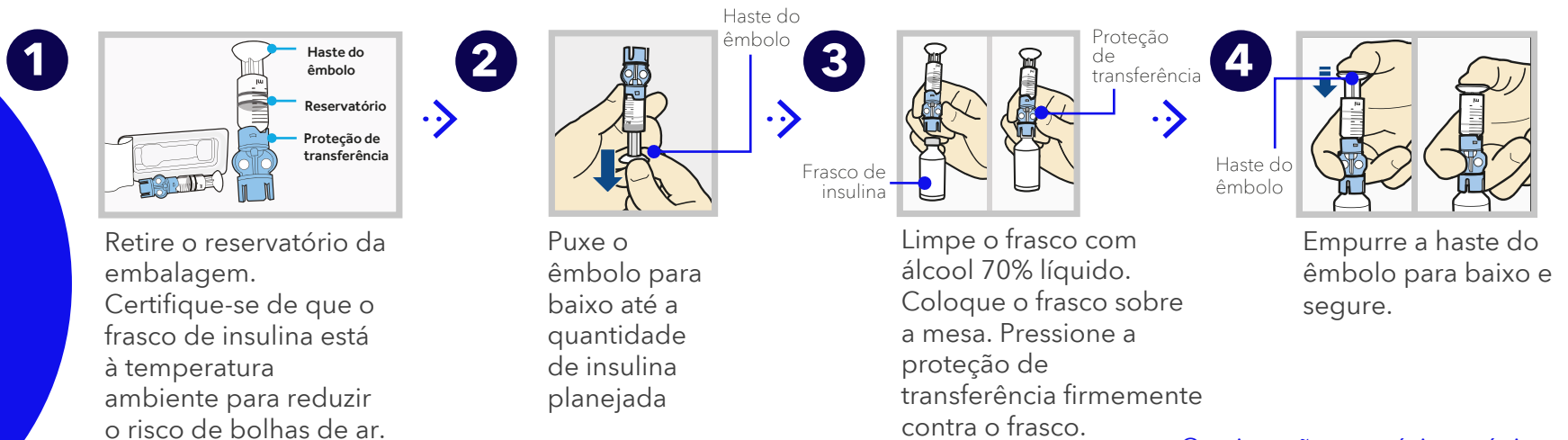


Continuação na próxima página


Trocar o conjunto de infusão MiniMed™ Quick-set™




Aviso: A entrada de insulina ou qualquer líquido no conector do cateter, pode bloquear temporariamente os respiros de ventilação que permitem que a bomba encha corretamente o conjunto de infusão. Isso pode resultar na administração de pouca insulina ou insulina em excesso, o que pode provocar hiperglicemia ou hipoglicemia.

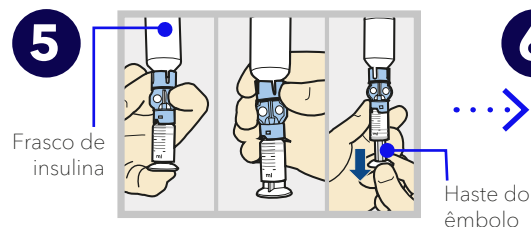


Com o polegar ainda no êmbolo, vire o frasco para ficar na parte de cima. Solte o polegar e puxe a haste do êmbolo para baixo para encher com insulina.

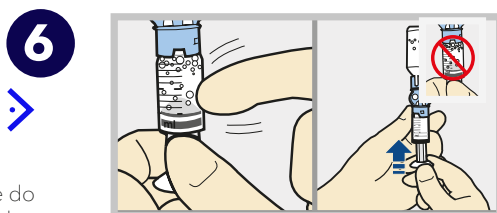

Bata levemente no reservatório para mover as bolhas de ar para o topo do reservatório. Empurre a haste do êmbolo para cima para empurrar o ar para o frasco.

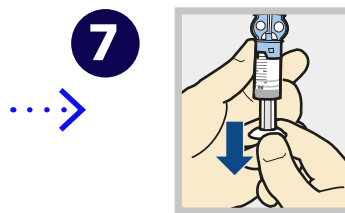


Caso necessário, puxe novamente a haste do êmbolo para baixo até a quantidade de insulina necessária para 2-3 dias.

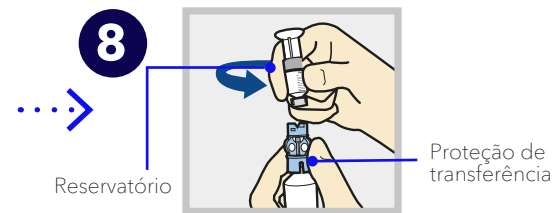


Para evitar a entrada de insulina na parte superior do reservatório, **vire o frasco de modo que este fique na posição vertical**.
Segure a proteção de transferência, gire o reservatório no sentido anti-horário e remova-o da proteção de transferência.


Conectar o reservatório ao conjunto de infusão
Coloque o conector do cateter, localizado na extremidade do conjunto de infusão, no reservatório cheio.

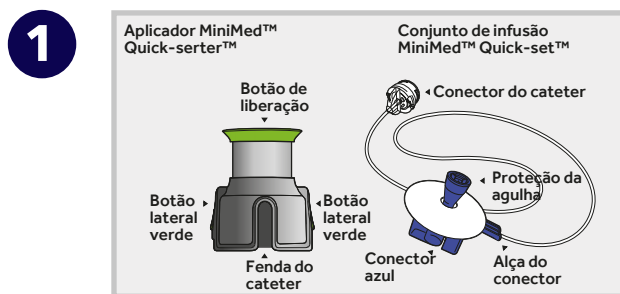

Retire o conjunto de infusão da embalagem. Remova o papel que segura o cateter.

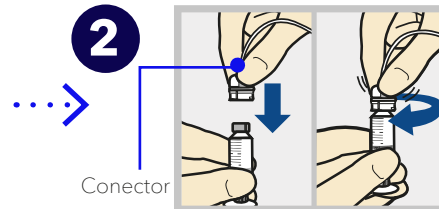

Pressione suavemente o conector sobre o reservatório. Gire-o no sentido horário até que fique travado. Escutará um clique.

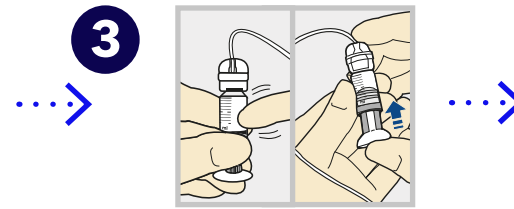


Se aparecerem bolhas de ar, bata no reservatório para movê-las para o topo. Empurre o êmbolo só um pouco para mover as bolhas para o cateter.

Continuação na próxima página

Trocar o conjunto de infusão MiniMed™ Quick-set™

4

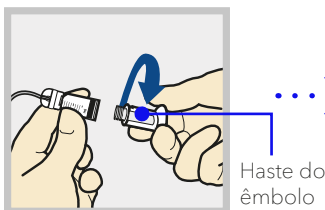

Gire a haste do êmbolo no sentido anti-horário para desrosquear e remover.


A luz de fundo pode estar apagada
Pressione qualquer botão para ativar novamente a tela



Pressione para abrir o menu.



Selecione .


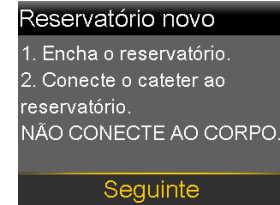


Selecione **Seguinte**.

Colocar o reservatório na bomba


Agora coloque o reservatório cheio no compartimento do reservatório da bomba.

1

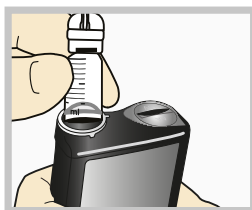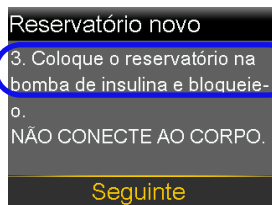


Coloque o reservatório na bomba.

2

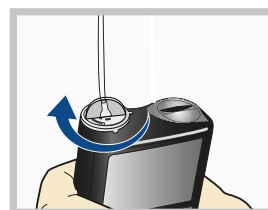

Gire no sentido horário até que o reservatório fique travado no lugar.

3

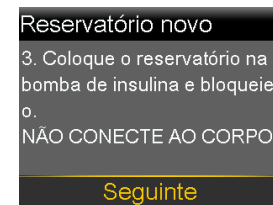

Selecione **Seguinte**.

Instalar o reservatório e encher o cateter

Siga estes passos para instalar o reservatório e encher o cateter.

1




Selecione **Instalar** e mantenha pressionado.

2




Quando essa tela aparecer, selecione **Seguinte**.

3

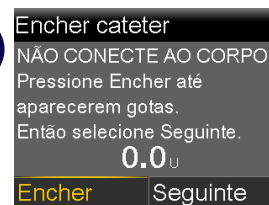


Selecione **Encher** e continue pressionando até aparecerem gotas na extremidade do cateter, em seguida, solte-o.

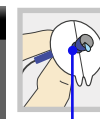

Gotas na extremidade do cateter.

4

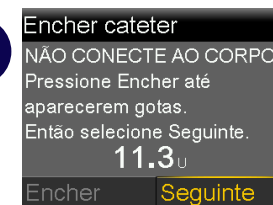


Após aparecerem gotas, pressione e selecione **Seguinte**.


Trocar o conjunto de infusão MiniMed™ Quick-set™

Inserir o conjunto de infusão

Em seguida, siga os passos para inserir o conjunto de infusão no corpo.

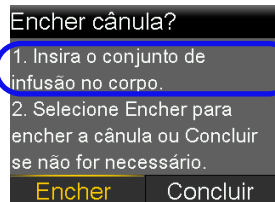


1

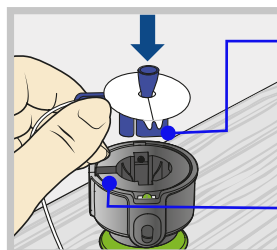

Conector azul

Fenda do cateter


2

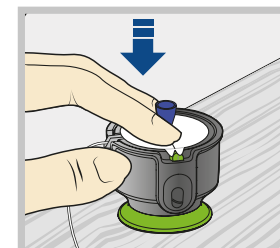

Coloque o aplicador Quick-serter™ da MiniMed™ sobre uma superfície plana e firme com o botão de liberação verde virado para baixo. Alinhe a alça do conector azul com a fenda do cateter e coloque o conector no Quick-serter™.

Use dois dedos para encaixar o conjunto de infusão de maneira firme, pressionando suavemente.

3

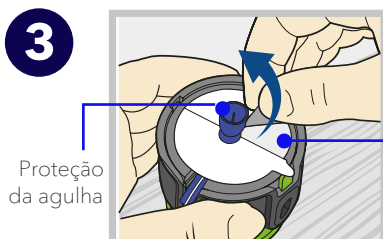


Proteção da agulha

Adesivo


Segurando a proteção da agulha, retire o revestimento do adesivo nos dois lados da proteção da agulha.

4

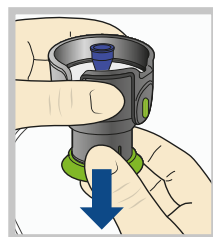


Puxe o botão verde para baixo até ouvir um clique.

5

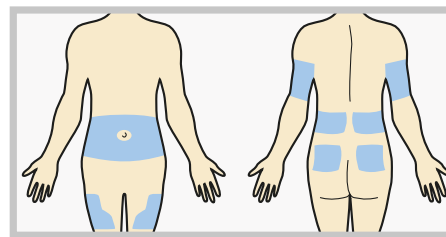

Escolha um local de inserção entre as áreas sombreadas aqui ilustradas. Limpe com álcool 70% líquido ou outro antisséptico.

6

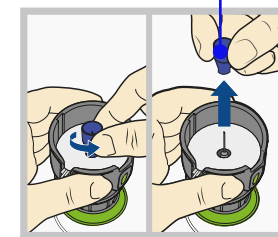


Proteção da agulha

Gire para afrouxar a proteção da agulha e puxe.


Trocar o conjunto de infusão MiniMed™ Quick-set™

7

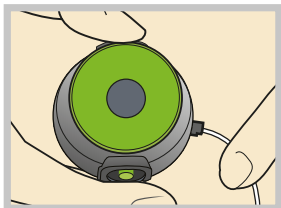


Segure o aplicador contra o local de aplicação limpo.

8

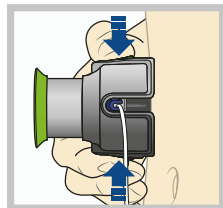


Pressione os dois botões laterais verdes ao mesmo tempo.

9

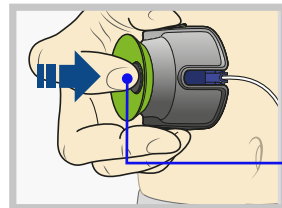


Pressione o botão de liberação para soltar

10

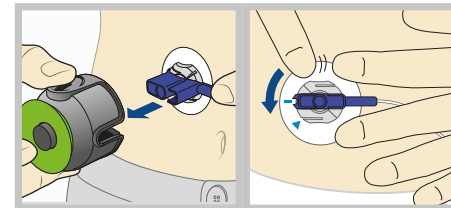


Puxe o aplicador para longe do corpo. Pressione o adesivo contra a pele.

11

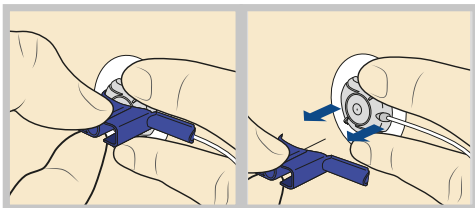

Segure o conjunto de infusão. Puxe a alça azul de forma reta para fora para remover a agulha.

12

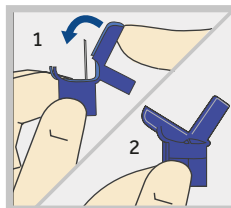


Dobre a alça azul até que esta fique travada. Descarte a alça azul em um recipiente para objetos perfurocortantes.

Trocar o conjunto de infusão MiniMed™ Quick-set™

Encher a cânula

Encha a cânula, o pequeno tubo sob a sua pele, com insulina.


1

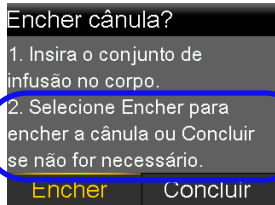

Encher cânula?
1. Insira o conjunto de infusão no corpo.
2. Selecione Encher para encher a cânula ou Concluir se não for necessário.
Encher Concluir

Selecione **Encher**.

2

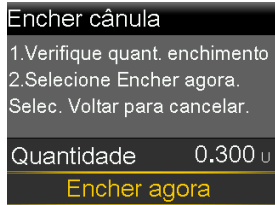

Encher cânula
1. Verifique quant. enchimento
2. Selecione Encher agora.
Selec. Voltar para cancelar.
Quantidade 0.300 U
Encher agora


Selecione **Quantidade** e insira:

- 0,300 se estiver usando uma cânula de 6 mm
- 0,500 se estiver usando uma cânula de 9 mm

Em seguida pressione **⊙**

-  **Observação:** a bomba lembrará a última **Quantidade** de enchimento utilizada. Sempre verifique se a Quantidade está correta.
- Se estiver correta, pressione **⏏** para **Encher agora** e pressione **⊙**.
 - Se estiver incorreta, pressione **⊙**. Altere para a quantidade correta e pressione **⊙**. Em seguida selecione **Encher agora**.

3

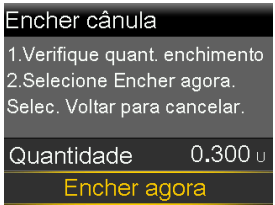

Encher cânula
1. Verifique quant. enchimento
2. Selecione Encher agora.
Selec. Voltar para cancelar.
Quantidade 0.300 U
Encher agora

Selecione **Encher agora**.

4




09:00
Encher cânula 0.025 U
Total: 0.300 U
Parar enchimento

A tela Início exibe a insulina à medida que ela enche a cânula.

-  **Observação:** Selecione **Parar enchimento** se necessário. Por exemplo, pare o enchimento da cânula se a quantidade **Total** estiver errada. Isso raramente acontecerá se a **Quantidade** for verificada na tela anterior.

A troca do conjunto de infusão está concluída!

Aplicar sensor
Guardian™ Sensor (3) com
o aplicador One-press

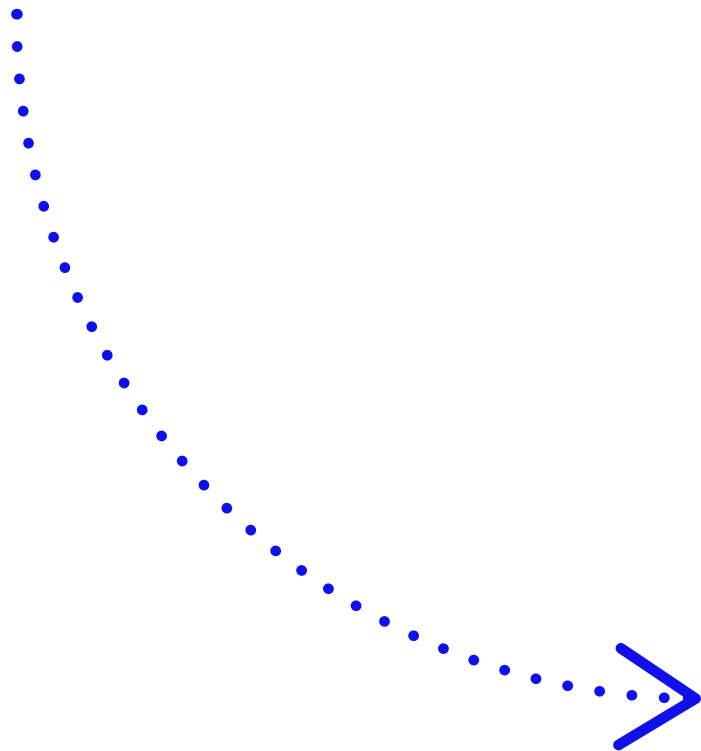


Aplicar sensor Guardian™ Sensor (3) com o aplicador One-press

Aplicação de um sensor novo


Lave as mãos com água e sabão e limpe o local de inserção com álcool 70% líquido.

1

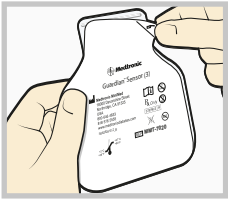


Abrir a embalagem do sensor. Puxe o canto da cobertura de papel para abrir a embalagem do sensor.

2a

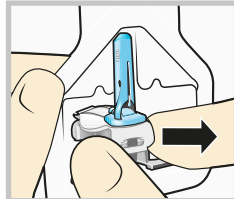


Segure o sensor pelo pedestal de plástico. Retire o sensor com o pedestal da embalagem segurando apenas o pedestal. Coloque o sensor/pedestal sobre uma superfície limpa e plana (como uma mesa).

2b

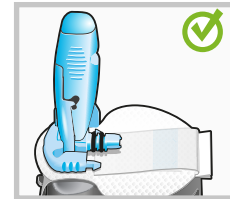



Correto

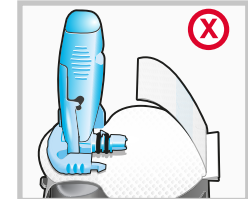




Incorreto

Dobre a aba adesiva. Certifique-se de que a aba adesiva do sensor está dobrada por baixo do conector e encaixes do sensor.

3

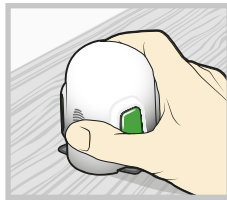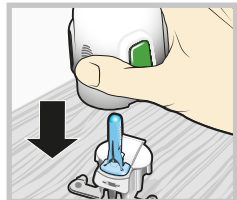

4

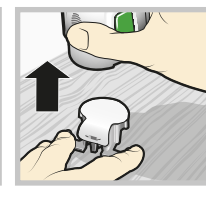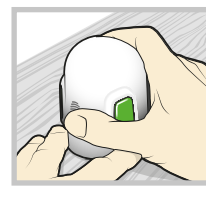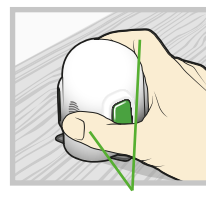

Coloque o sensor no aplicador. Segure o aplicador exatamente como mostrado **com o polegar na marca de impressão digital do aplicador. Não segure nos botões laterais.** Empurre o aplicador para encaixar no pedestal até a base do aplicador encostar na mesa.

Retire o aplicador do pedestal. Para retirar o aplicador do pedestal, segure o aplicador como mostrado, com o polegar na marca de impressão digital do aplicador. Com a outra mão, coloque dois dedos nos braços do pedestal e puxe lentamente o aplicador para cima.


Os dedos NÃO seguram os botões laterais.



Observação: certifique-se de que o pedestal esteja firme sobre a mesa antes de puxar o aplicador



Advertência: não desencaixe o suporte do aplicador no ar, pois isso pode danificar o sensor.

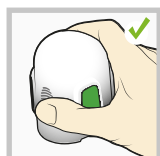

Correto



Incorreto

Continuação na próxima página

Aplicar sensor

Guardian™ Sensor (3) com o aplicador One-press


5a



Observação: não segurar o aplicador com firmeza contra o corpo pode permitir que este se mova ao pressionar os botões e resultar em inserção incorreta do sensor.


Posicione o aplicador no corpo. Segure o aplicador firmemente contra o local de aplicação limpo, sem empurrar o aplicador excessivamente contra a pele.

5b

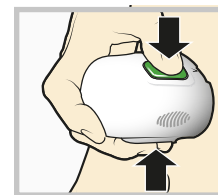


Aplique o sensor. Pressione e solte a **saliência** em ambos os botões simultaneamente.

5c

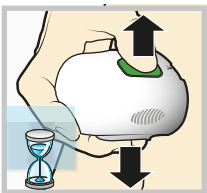



Segure o aplicador contra o corpo. Continue segurando o aplicador contra o corpo durante pelo menos cinco segundos, para permitir que o adesivo se cole à pele.

5d

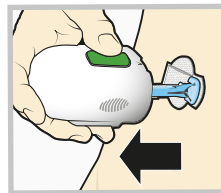

Retire o aplicador do corpo. Retire lentamente o aplicador da pele, certificando-se de que os botões não sejam pressionados.

6

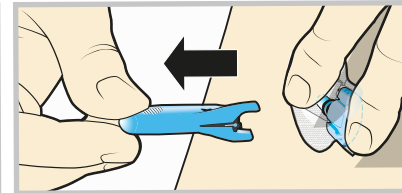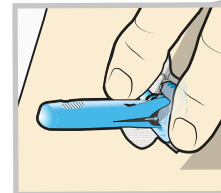

Retire a proteção da agulha. Segure cuidadosamente a base do sensor contra a pele com uma mão. Com a outra mão, segure a **extremidade superior** da proteção da agulha e puxe-a lentamente para cima, afastando-a do sensor. Descarte a proteção da agulha em um recipiente para objetos perfurocortantes.




Observação: aplique adesivo líquido adicional. Um adesivo opcional, como Skin Tac™, pode ser utilizado sob o adesivo, antes da remoção do revestimento. Deixe secar.

Continuação na próxima página

Aplicar sensor

Guardian™ Sensor (3) com o aplicador One-press


7a

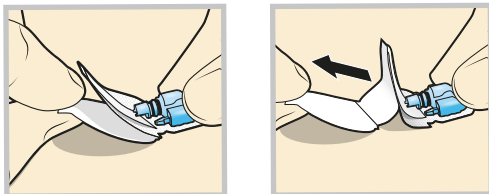

Remova o revestimento do adesivo.

Mantenha o sensor na posição e retire cuidadosamente o revestimento da parte de baixo do adesivo.

7b

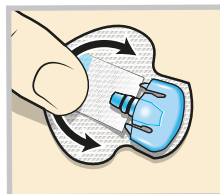


Pressione todo o adesivo contra a pele.

Pressione firmemente o adesivo contra a pele e alise todo o adesivo para que fique firme na pele.



Observação: o adesivo do Guardian Sensor (3) é sensível à pressão. Continue aplicando pressão sobre o adesivo para garantir que o sensor permaneça inserido na pele por 7 dias de uso.


8a

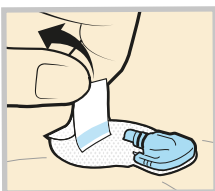

Desdobre a aba adesiva.

Desdobre a aba adesiva e retire-a da parte de baixo do conector.

8b

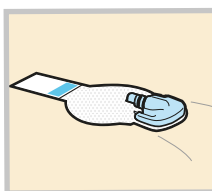


Estique a aba adesiva.

Estique a aba adesiva para que fique plana contra a pele, mas não remova o revestimento ainda.


Fixar sensor com adesivo

1

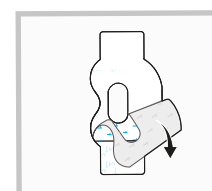

Remova o revestimento com a marca 1.

2

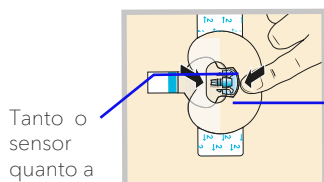


Tanto o sensor quanto a pele estarão cobertos com o adesivo

Aplique o adesivo conforme indicado e pressione com firmeza.

A parte larga do adesivo cobre metade da base do sensor.


3

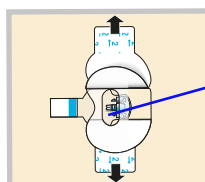

Remova o revestimento do adesivo com a marca 2 de cada lado.

Conector e encaixes no orifício do adesivo.

4

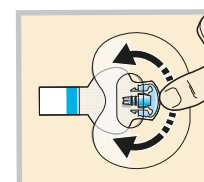

Alise o adesivo


Continuação na próxima página

Aplicar sensor

Guardian™ Sensor (3) com o aplicador One-press



1

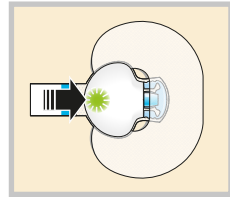


Conecte o transmissor ao sensor.



Observação: aguarde a luz verde do transmissor piscar. Se a luz verde não piscar, consulte a seção de Resolução de problemas do guia do usuário do transmissor.



2

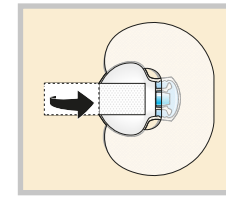


Cubra o transmissor com a aba adesiva.



Observação: Não deixe a aba muito apertada


3

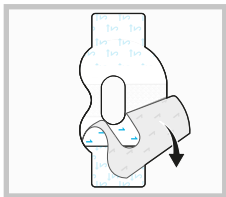

Para aplicar o 2º adesivo, remova o revestimento do adesivo com a marca 1.



4

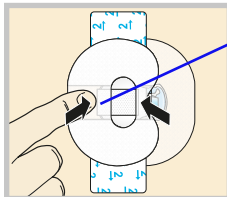


Gire o 2º adesivo e coloque-o sobre o transmissor. Pressione o adesivo com firmeza

A parte larga do adesivo cobre a extremidade do transmissor e a pele.




5

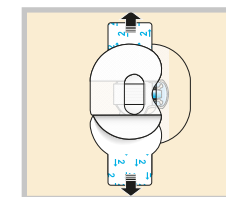

Retire o revestimento do adesivo com a marca 2 de cada lado.




6

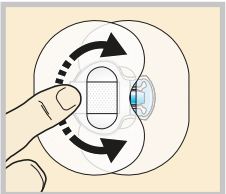

Alise o adesivo.



7

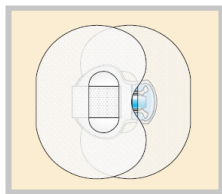

Esta imagem é um exemplo de adesivo oval aplicado corretamente.



Observação: verifique o local regularmente. Aplique um adesivo comercial adicional se o sensor e o transmissor não estiverem firmes.

Continuação na próxima página

Aplicar sensor


Guardian™ Sensor (3) com o aplicador One-press




Após ser exibida a mensagem **Sensor conectado**, pressione . Isso normalmente demora menos de um minuto, mas poderá demorar até 5 minutos.



Selecione **Iniciar sensor novo**.

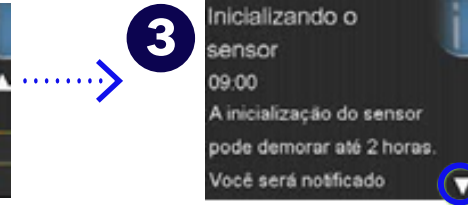

A mensagem **Inicializando o sensor** é exibida. Pressione e em seguida para apagar.

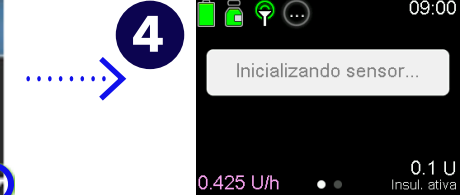

A mensagem **Sensor inicializando...** aparecerá na tela Início até que o sensor esteja pronto para a primeira calibração.

